

Le chariot-douche

CAREVO



Le chariot de douche CAREVO d'ArjoHuntleigh est une solution d'hygiène innovante pour les patients immobiles. Les caractéristiques, la conception et l'interface utilisateur intuitive en font une solution d'hygiène facile à utiliser et efficace pour le personnel soignant et les patients immobiles.

Les Plus du chariot-douche CAREVO

Zone d'accès ergonomique

- Réduit la distance résident/soignant (surcharge statique)
- Favorise la proximité soignant/résident (communication)
- Favorise l'accès lors des transferts du ou vers le lit (translation)

Flexizone

- Amélioration sensible du confort allongé sur le dos ou sur le côté
- Facilitation des changements de position
- Prévention du glissement du patient/résident

Matelas en polyuréthane fixé par 2 plots

- Souple et « chaud » au toucher
- Un matelas amovible en un clin d'œil
- Epaisseur doublée : 30 mm
- Résistant aux contraintes mécaniques et aux désinfectants
- Polyuréthane = matière biocompatible (ISO 10993)

Poignées résident

- Stimule la participation du résident
- Favorise les utilisations « un soignant pour un résident »

Commandes intégrées aux barrières sur 3 côtés

- Absence de télécommande et de son câble de raccordement
- Toujours à proximité et à hauteur du soignant
- Rien à tenir en main

Mode Large

- Meilleur accueil des résidents corpulents

Dossier relevable électriquement

- Augmente le confort du résident et la relation soignant/résident

Vérin à mouvement vertical

- La stabilité ne varie pas suivant le degré d'élévation

Autres caractéristiques

- 2 batteries interchangeables
- Evacuation en deux parties adaptables
- Porte-douchettes intégré



Convient à :

- Carl : assis dans un fauteuil roulant, est à peine capable de se soutenir.
- Doris : qui est incapable de se soutenir.



En option :

- Relève-buste intégré
- Oreiller classique
- Oreiller triangulaire



Mode large



Matelas en PU confortable



Support douchette



Matelas amovible



Dossier relevable (en option)



Zone d'accès facilitée



Flexizone



Poignée patient



Commandes intégrées

Caractéristiques techniques

Caractéristiques du produit

Capacité maximale admissible	200kg
Poids maximal patient	182 kg
Poids du chariot douche	82 kg
Degré de protection	IPX4
Tension nominale de l'appareil	24 V CC
Forces de fonctionnement	
Boutons de commande	5N
Freins	70N
Conduite en ligne droite	20N
Bouton d'arrêt d'urgence	25N
Poignées d'ouverture	30N
Batterie	
Type	NiMH (nickel-hydrure métallique)
Capacité	2,5 Ah
Tension	24 V CC
Niveau sonore	50 dB
Puissance du moteur (montée/descente)	216 VA
Puissance du moteur (dossier réglable)	72 VA
Degré de protection contre les incendies	Conforme aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2
Largeur (plateau)	586 mm
Largeur totale (barrières latérales comprises)	759 – 888 mm
Longueur totale	2005 mm
Longueur du châssis (carénage des roues compris)	1203 mm
Largeur du châssis	700 mm
Hauteur du châssis (au-dessus des roues)	204 mm
Hauteur du sol jusqu'au plateau, en position haute	955 mm
Hauteur du sol jusqu'au plateau, en position basse	605 mm
Amplitude de levage	350 mm
Evacuation composée de	2 parties (1 courte et 1 rallonge amovible)
Diamètre du tuyau d'évacuation	40 mm
Amplitude max. du dossier (option)	15°
Fourni avec un oreiller et des barrières latérales escamotables avec verrouillage de sécurité	

* Se référer au manuel d'utilisations



Chez Arjo, nous avons pour mission d'améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de mobilité réduite et de relever les défis liés au bien-être. Avec des produits et des solutions qui garantissent un transfert ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, la prévention et le traitement efficaces des escarres et de la thrombose veineuse, nous aidons les professionnels de santé à améliorer continuellement la sécurité et la dignité des soins. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en pensant à l'humain avant tout. www.arjo.com

Arjo France SAS
2, Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
59436 Roncq Cedex
France
Tel : 03 20 28 13 13
info.france@arjo.com
www.arjo.com



* L'humain avant tout

01.BO.01.4.FR.1.AHG - Février 2016 Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Parker est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. © Arjo, 2016.


Appliquer et relâcher le frein

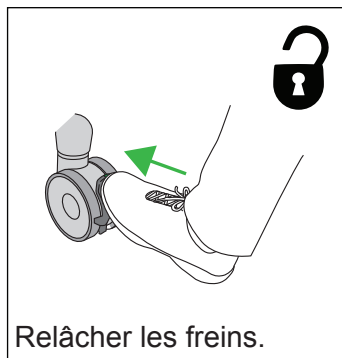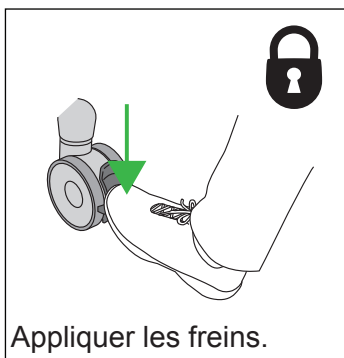


Dispositif de conduite en ligne droite

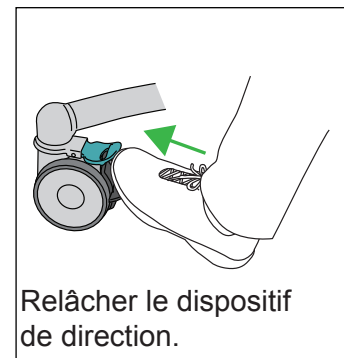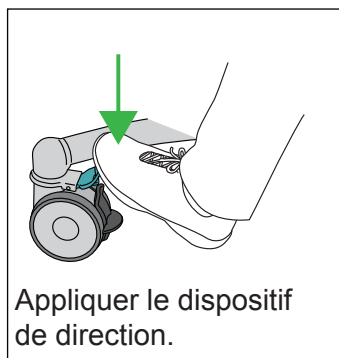


Panneau de commande

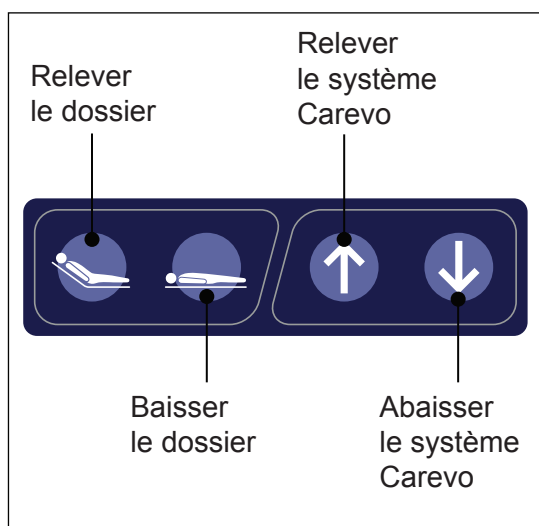


Barrière latérale

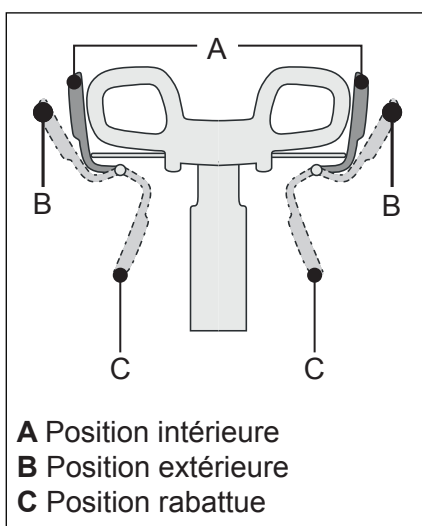


Bouton d'arrêt d'urgence

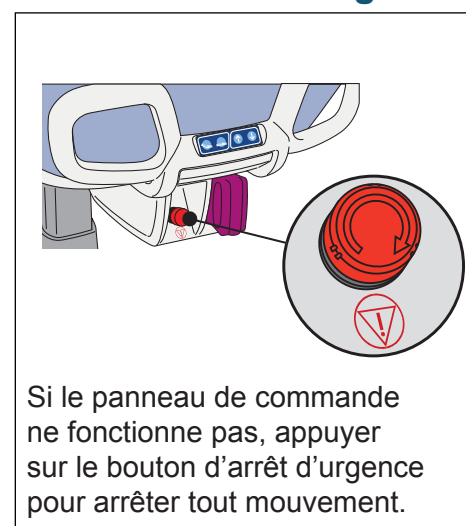

Insertion de la batterie

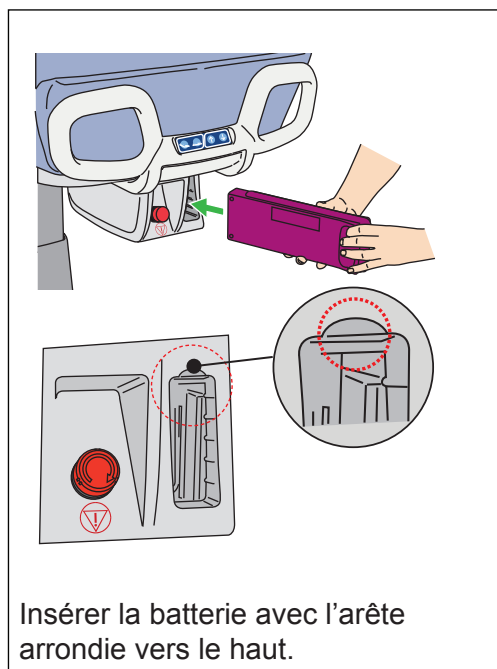


Retrait de la batterie

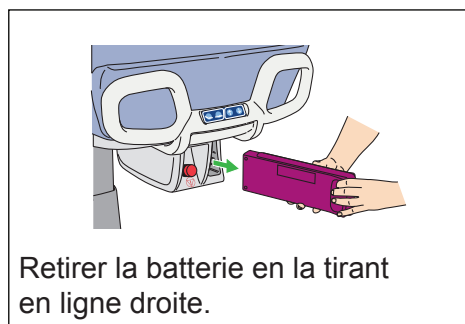


Poignées de maintien



Flexi zone

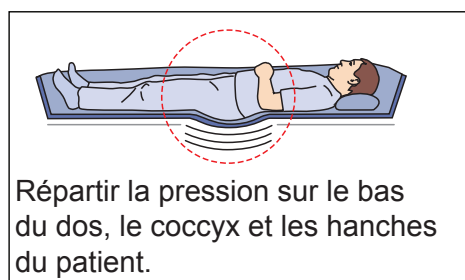

Position de flexi zone

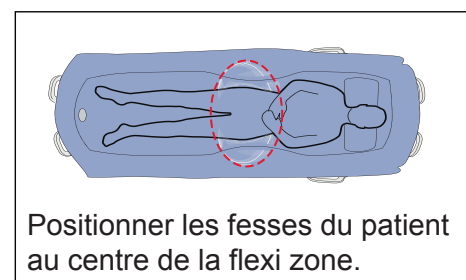

Nettoyage


Désinfectants autorisés

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Accessoires


- Lunettes de protection
- Gants de protection
- Pulvérisateur (en cas d'absence d'un tableau de douche)
- Produit désinfectant
- Lingettes jetables
- Brosse de nettoyage douce
- Goupillon

1

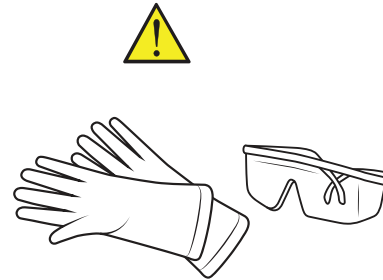


Porter des gants et des lunettes de protection.

2

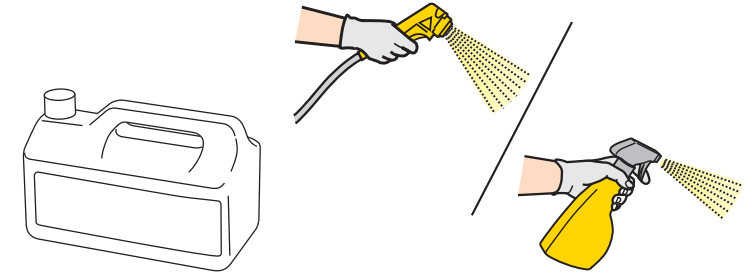


Vérifier que le désinfectant est bien mélangé comme suit :
- étiquette du flacon de désinfectant ou
- rapport de mélange indiqué dans le mode d'emploi du tableau de douche

3

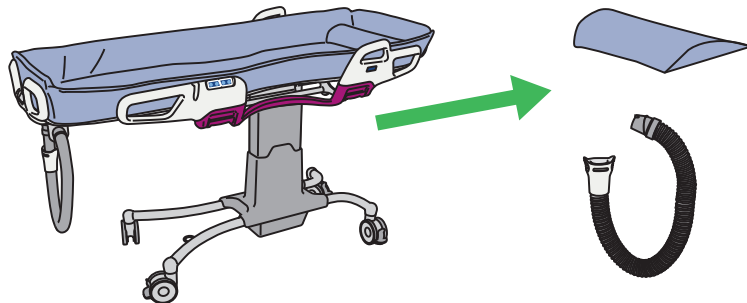


Retirer l'évacuation inférieure et l'oreiller.

4

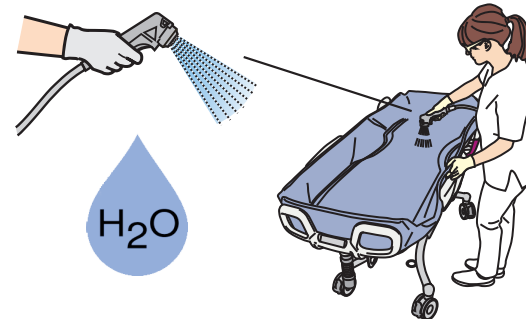

Rincer à l'eau. Commencer par le haut du matelas et descendre jusqu'aux roulettes.

5

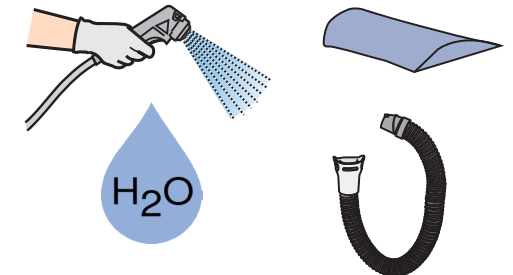


Rincer l'évacuation inférieure et l'oreiller avec de l'eau.

Poursuivre avec les étapes de la page suivante


Nettoyage (suite)

6

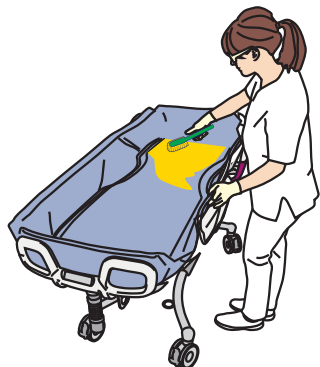


Utiliser une brosse de nettoyage à poils doux avec du désinfectant. Frotter en commençant par le haut du matelas et descendre jusqu'aux roulettes. Utiliser un goupillon imbibé de désinfectant. Nettoyer l'évacuation supérieure.

7

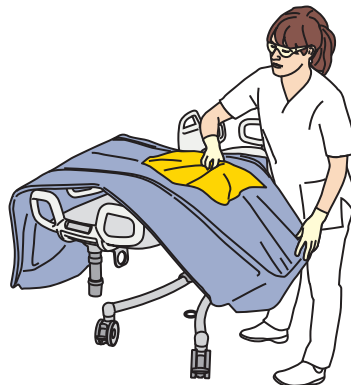

Nettoyer le dessous du matelas, les plaques de support et l'extérieur de l'évacuation supérieure.


8

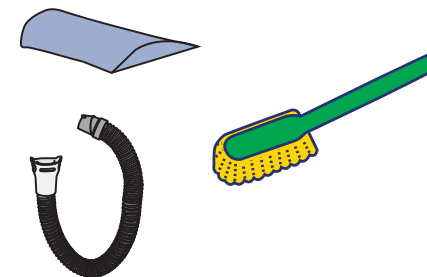

Utiliser une brosse de nettoyage douce. Frotter l'oreiller et l'évacuation inférieure séparément. Éviter tout contact avec le matelas tant que l'oreiller n'a pas été désinfecté.

Désinfection

9

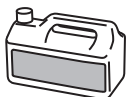


Soulever et placer le matelas sur le panneau côté pieds et les barrières latérales. Surface inférieure du matelas orientée vers le haut. Pulvériser du désinfectant à la surface arrière du matelas.

10



Nettoyer la surface arrière du matelas à l'aide d'une lingette jetable.

11

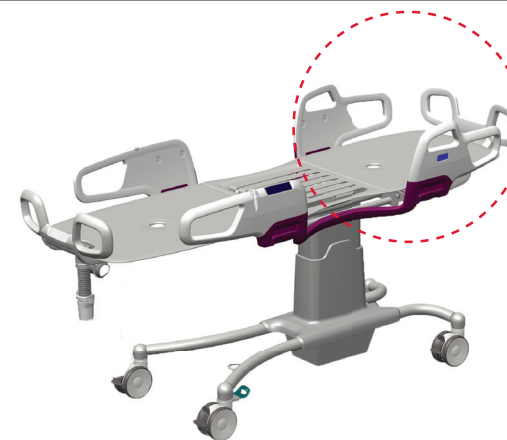


Pulvériser du désinfectant et nettoyer les pièces suivantes côté tête : panneau côté tête, barrières latérales, plaque de support et flexi zone.

Poursuivre avec les étapes de la page suivante

Désinfection (suite)

12

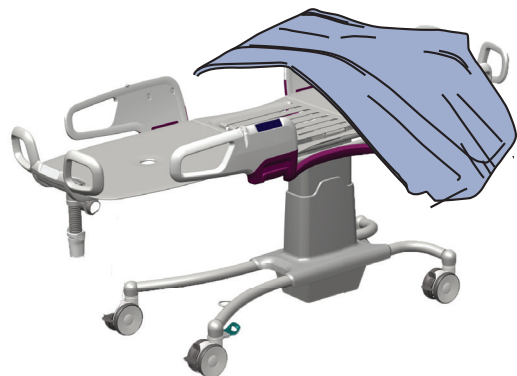


Placer la surface arrière du matelas désinfectée sur le panneau côté tête et les barrières latérales désinfectés. Surface intérieure du matelas non désinfectée vers le haut. Pousser les plis des coins du matelas vers l'extérieur.

13




Pulvériser du désinfectant et nettoyer la surface intérieure du matelas à l'aide d'une lingette jetable. Rentrer les plis des coins du matelas.

14

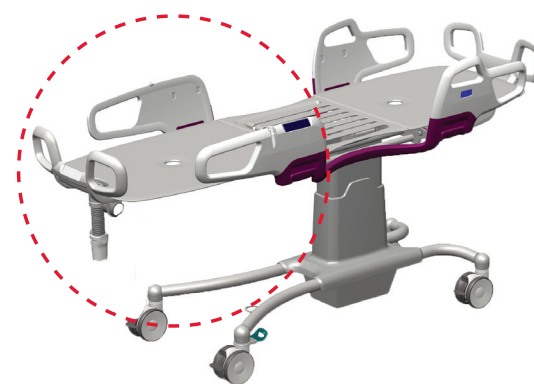


Pulvériser du désinfectant et nettoyer les pièces suivantes côté pieds : panneau côté pieds, barrières latérales, plaque de support, flexi zone et évacuation supérieure.

15

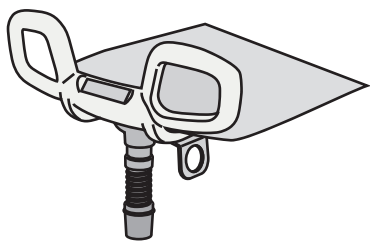

Pulvériser du désinfectant sur l'évacuation supérieure et nettoyer à l'aide d'un goupillon.

16

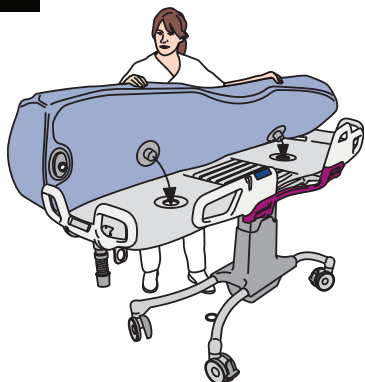

Remettre le matelas dans sa position d'origine.

17




Pulvériser du désinfectant. Commencer par le haut du matelas et descendre jusqu'aux roulettes.

18



Nettoyer à l'aide d'une lingette jetable. Commencer par le haut du matelas et descendre jusqu'aux roulettes.

19

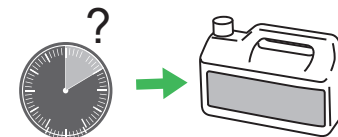


Prévoir un temps de contact approprié avec le désinfectant.

Poursuivre avec les étapes de la page suivante


Désinfection (suite)

20

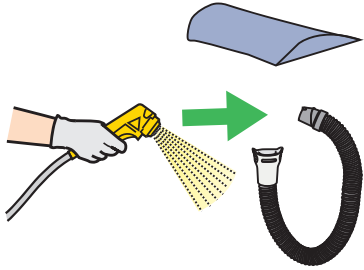


Pulvériser du désinfectant pour nettoyer l'oreiller et l'évacuation inférieure séparément à l'aide d'une lingette jetable.

21

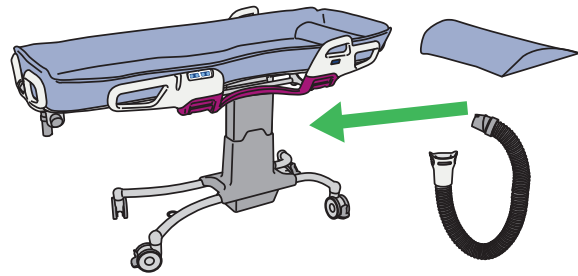

Raccorder l'évacuation inférieure à l'évacuation supérieure et placer l'oreiller sur le matelas.

22

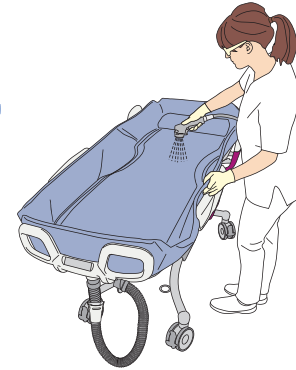

Rincer toutes les pièces à l'eau froide jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace visible de désinfectant. Commencer par le haut du matelas et descendre jusqu'aux roulettes. Rincer le dessous du matelas.

23



Bien essuyer chaque pièce à l'aide de lingettes jetables.

Carevo

Transfert depuis le lit



1

Serrer les freins du lit.

2

Placer un drap de transfert sous le patient.
Placer un coussin sous la tête du patient.
Rabattre la barrière de lit côté transfert.

3

Placer le chariot de douche près du côté transfert du lit. Rabattre le matelas du chariot de douche côté transfert.

4

Enfoncer et fixer les coins du matelas du chariot de douche entre le panneau de tête/pieds et la plaque de support.

5

Régler la hauteur du chariot de douche afin qu'il soit légèrement plus bas que le lit.

6 Risque de basculement

Ne pas relever ou abaisser un autre équipement.
Pousser le chariot de douche contre le lit.

7 Risque de basculement

Serrer les freins du chariot de douche.

8 Risque de basculement

Ne pas relever ou abaisser un autre équipement. Transférer le patient.
Garder un œil sur la tête du patient.


Poursuivre avec les étapes de la page suivante

Transfert depuis le lit (suite)

9



Risque de glissement

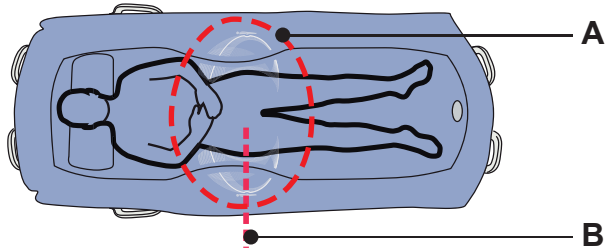


Maintenir les bords du matelas relevés, non pliés.
Positionner correctement le patient sur la Flexi Zone.
Fessier du patient dans le contour graphique (A).
Les plis de la hanche du patient sont alignés avec la représentation du corps humain (B).

10



Remplacer l'oreiller du lit par l'oreiller du chariot de douche.
Retirer le drap de transfert.

11

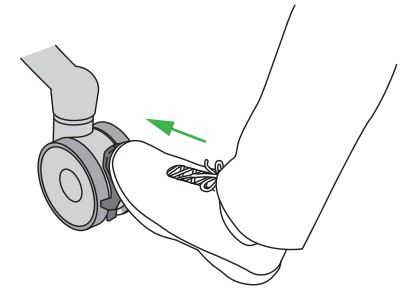


Libérer les freins du chariot de douche.

12



Risque de coincement
Risque de chute

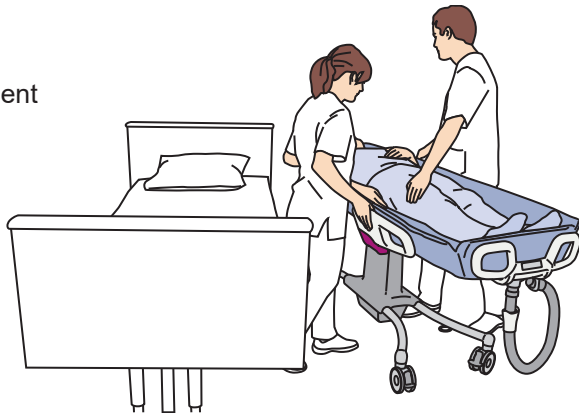

Maintenir les cheveux, les bras et les pieds du patient près du corps.
Écarter avec précaution le chariot de douche du lit de façon à ce que l'espace soit suffisant pour replier la barrière latérale du chariot de douche.


13



Relever le dossier réglable du chariot de douche (si le chariot en est pourvu).
Transporter le patient.


Transfert dans le lit

1

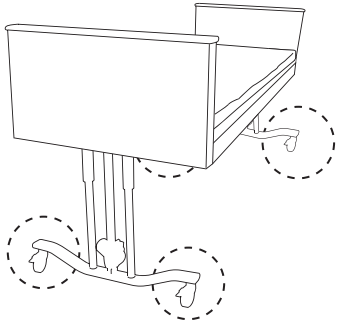

Serrer les freins du lit.
Rabattre la barrière de lit côté transfert.

2

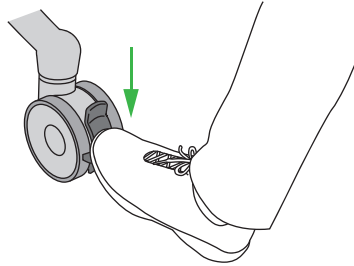


Serrer les freins du chariot de douche.
Faire descendre le dossier réglable
du chariot de douche (si le chariot
en est pourvu).

3



Placer un drap de transfert sous le patient.

4

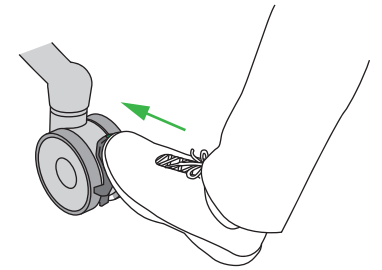


Libérer les freins du chariot
de douche.

5



Risque de coincement

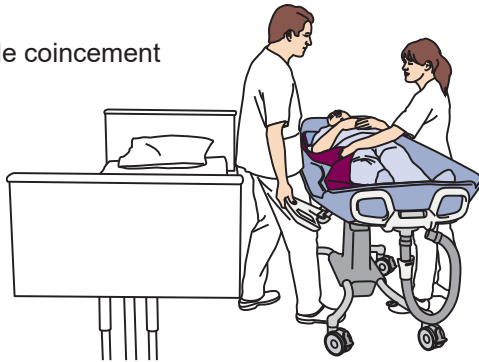


Maintenir les cheveux, les bras et les pieds du patient près
du corps.
Positionner le chariot de douche près du lit.
Rabattre la barrière latérale du chariot de douche côté transfert.

6




Risque de basculement

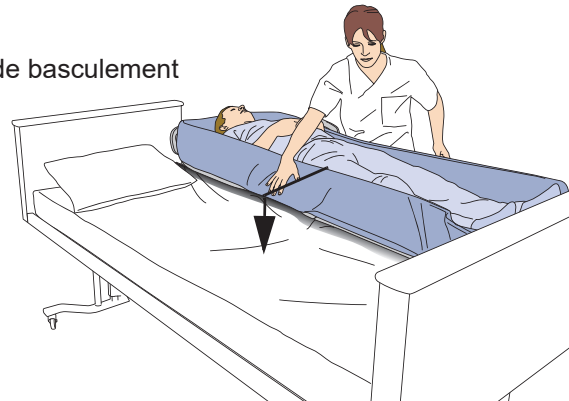

Positionner immédiatement le chariot de douche de façon
à ce qu'il chevauche le lit.
Faire descendre le chariot de douche sur le lit pour assurer
un transfert en toute sécurité.

7

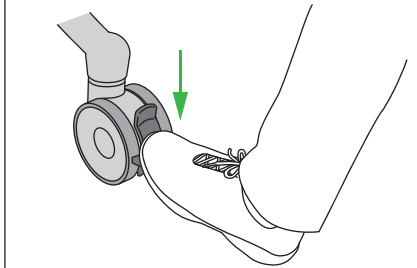


Serrer les freins du chariot
de douche.

Poursuivre avec les étapes de la page suivante


Transfert dans le lit (suite)

8

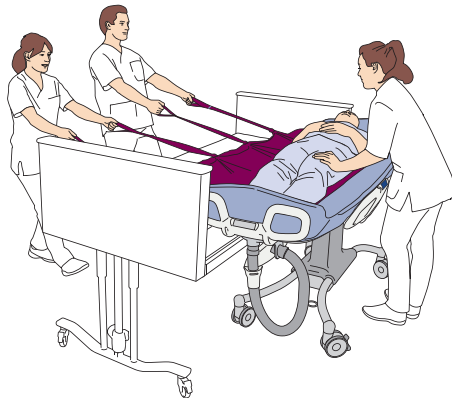


Vérifier que le matelas du chariot de douche se trouve au-dessus du lit.
Transférer le patient à l'aide du drap de transfert.
Garder un œil sur la tête du patient.

9

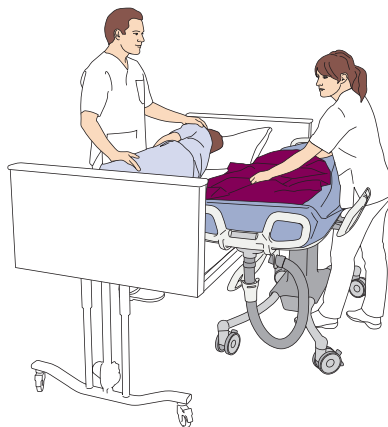


Remplacer l'oreiller du chariot de douche par l'oreiller du lit.
Retirer le drap de transfert.

10

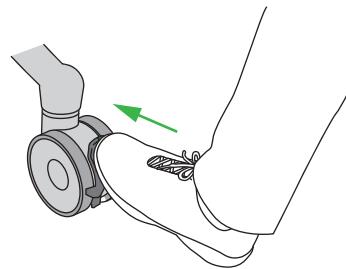

Libérer les freins du chariot de douche.


11

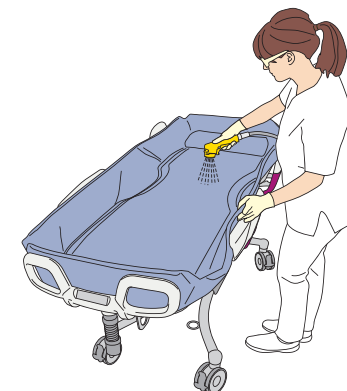

Éloigner le chariot de douche du lit.
Désinfecter le chariot de douche.

Transfert depuis le lève-personne

1

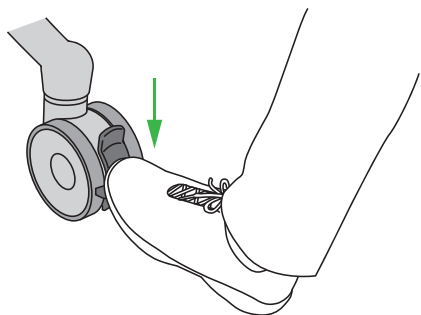

Chariot de douche :

- Faire descendre le système jusqu'à sa position la plus basse
- Serrer les freins
- Relever et bloquer les barrières latérales
- Positionner l'oreiller

2



Risque de coincement
Risque de chute




Maintenir les cheveux, les bras et les pieds du patient près du corps.
Relever le dossier réglable du chariot de douche en position assise (si le chariot en est pourvu). Faire descendre le patient sur le chariot de douche.

3




Risque de glissement

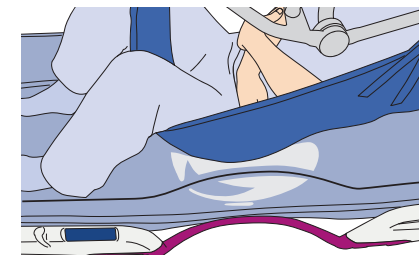


Maintenir les bords du matelas relevés, non pliés.
Positionner correctement le patient sur la Flexi Zone.
Fessier du patient dans le contour graphique.
Les plis de la hanche du patient sont alignés avec la représentation du corps humain.

4

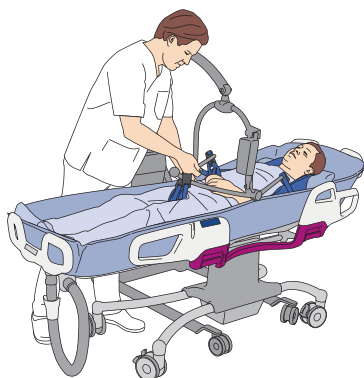

Détacher le harnais du berceau.
Éloigner le lève-personne du chariot de douche.

5

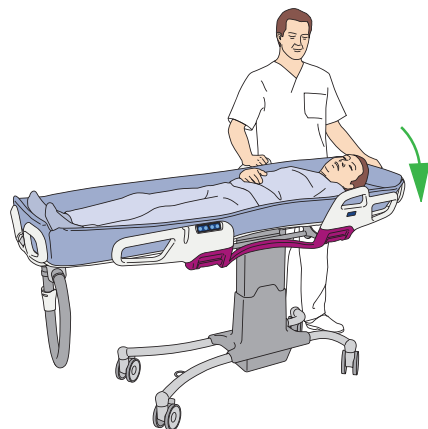


Régler le chariot de douche à une hauteur ergonomique.
Faire descendre le dossier réglable du chariot de douche (si le chariot en est pourvu).

6



Retirer le harnais installé sous le patient.


7

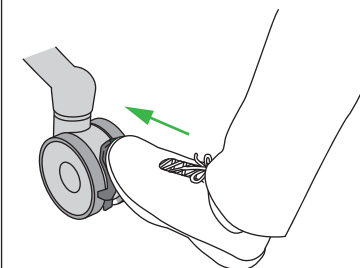

Libérer les freins du chariot de douche.
Transporter le patient.


Transfert dans le lève-personne

1

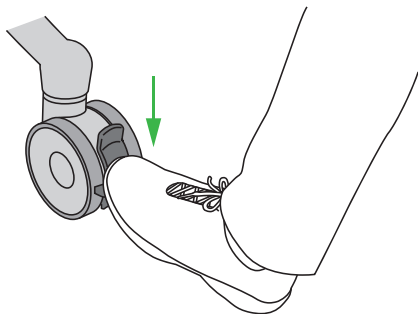

Serrer les freins du chariot de douche.

2

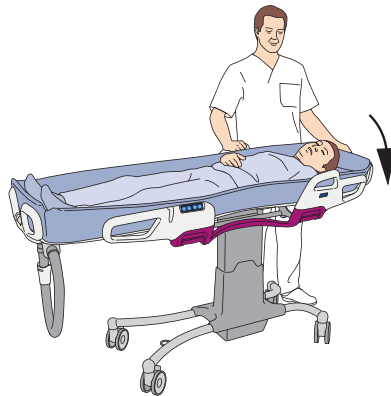

Faire descendre le dossier réglable du chariot de douche (si le chariot en est pourvu).

3



Installer le harnais sur le patient.

4



Faire descendre le chariot de douche jusqu'à la position la plus basse. Installer le berceau mobile du lève-personne au-dessus du chariot de douche. Fixer le harnais au berceau.

5




Risque de coincement
Risque de chute



Maintenir les cheveux, les bras et les pieds du patient près du corps.
Bloquer les barrières latérales.
Soulever le patient pour le sortir du chariot de douche.


6

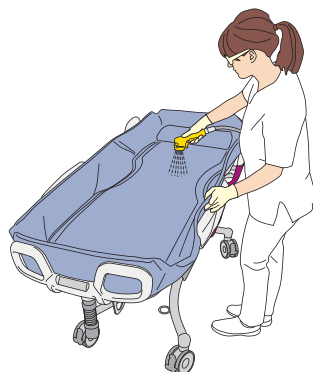

Désinfecter le chariot de douche.

Doucher le patient

1

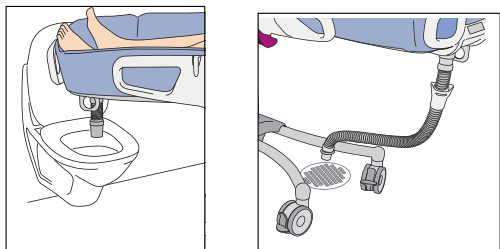


A

B

Positionner l'évacuation supérieure du chariot de douche sur les toilettes/le lavabo (A) ou positionner l'évacuation inférieure dans le support de tuyau de drainage, au-dessus du siphon de sol (B).

2

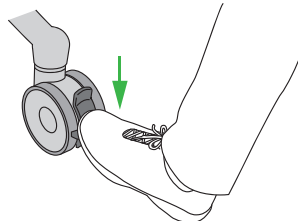


Serrer les freins du chariot de douche.

3




Risque de brûlures

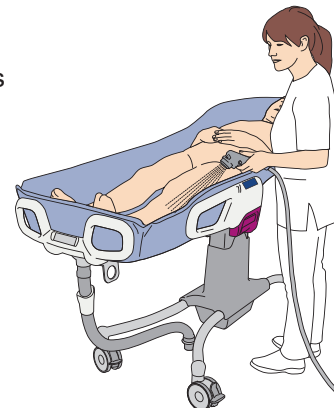


Déshabiller le patient.
Régler la température de l'eau.
Ne pas diriger la douchette sur le patient.
Ouvrir l'alimentation en eau.
Vérifier la température avec **votre** main.

4

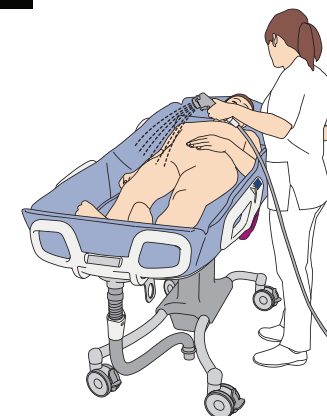


Doucher le patient.

5

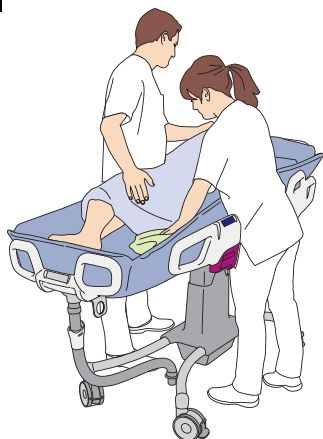


Évacuer l'eau et sécher le patient ainsi que le matelas.

6

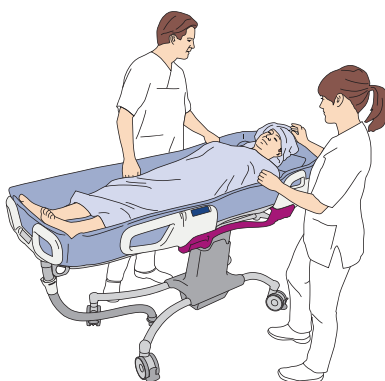


Couvrir ou habiller le patient.

7

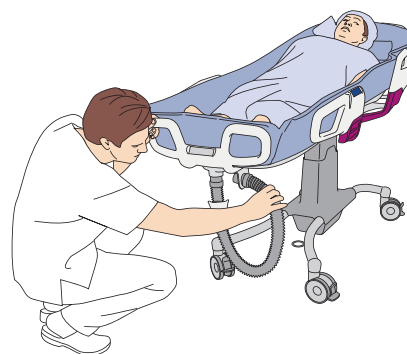


Replacer la sortie d'évacuation inférieure dans le support ou fixer l'évacuation inférieure à l'évacuation supérieure.

8

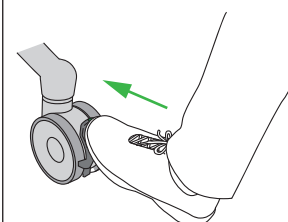

Libérer les freins du chariot de douche.

9

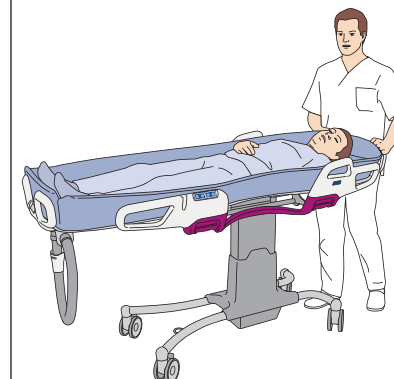

Transporter le patient.

