





Ce Guide de référence rapide a été créé pour aider les professionnels de santé et autres utilisateurs à maîtriser les aspects fonctionnels du système. Il ne remplace pas les consignes générales de sécurité, les avertissements et les recommandations fournis dans les instructions d'utilisation du produit, référence KX52180M-FR.

Commencer par consulter les instructions d'utilisation du produit.


Présentation générale du produit

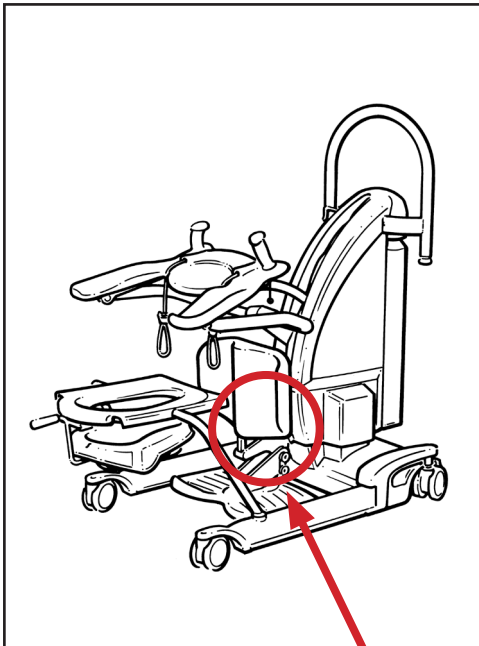


Fixer les cordons de réglage un par un au harnais

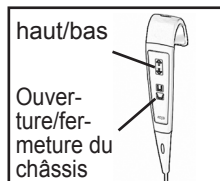

Utiliser la télécommande pour faire fonctionner le bras de levage

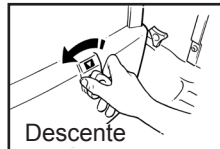

Si nécessaire, tourner la commande de descente d'urgence pour faire descendre le patient

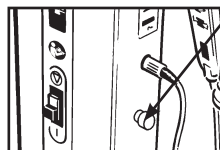


Si nécessaire, appuyer sur le bouton rouge d'arrêt d'urgence afin d'interrompre tous les déplacements électriques



Avertissement : La genouillère proactive peut être retirée pour permettre de marcher ou d'effectuer des exercices pour le genou. Lorsque la genouillère n'est pas en place, veiller à ce que le support attendant soit toujours retiré avant de commencer la thérapie. Lors du remplacement de la genouillère, veiller à ce qu'elle soit réinsérée dans le support et qu'elle le recouvre. Un mauvais placement de la genouillère pourrait causer de graves blessures.

1. Placer le harnais sur le patient (en veillant à utiliser la taille correcte). Vérifier que la sangle à ruban autoagrippant est bien fixée et que les bras du patient se trouvent en dehors du harnais.
2. Placer le SARA PLUS devant le patient, écarté les pieds du châssis, si besoin est, aider à placer les pieds du patient sur le repose-pieds, les genoux touchant la partie rembourrée du cale-genoux, puis serrer les freins des roues. Le patient peut se tenir aux poignées de préhension et reposer ses bras sur l'Arc-Rest™.
3. Régler la hauteur de l'Arc-Rest à la position la plus basse, et régler le cale-genoux, le cas échéant.
4. Attacher le harnais aux taquets de blocage et tirer les cordons afin d'éliminer le mou.
5. À l'aide de la télécommande ou du panneau à double commande, lever le patient jusqu'à la hauteur requise.
6. Libérer les freins, rapprocher les pieds, puis effectuer le transfert du patient vers la chaise, le lit ou les toilettes.
7. Placer le patient devant le fauteuil, le lit ou les toilettes, les mollets touchant doucement le fauteuil, par exemple, puis l'abaisser en position assise.
8. Détendre la tension exercée sur les cordons et les retirer du harnais.
9. Retirer le SARA PLUS, en veillant à enlever les pieds du patient du repose-pieds.
10. Retirer le harnais dans lequel est placé le patient.

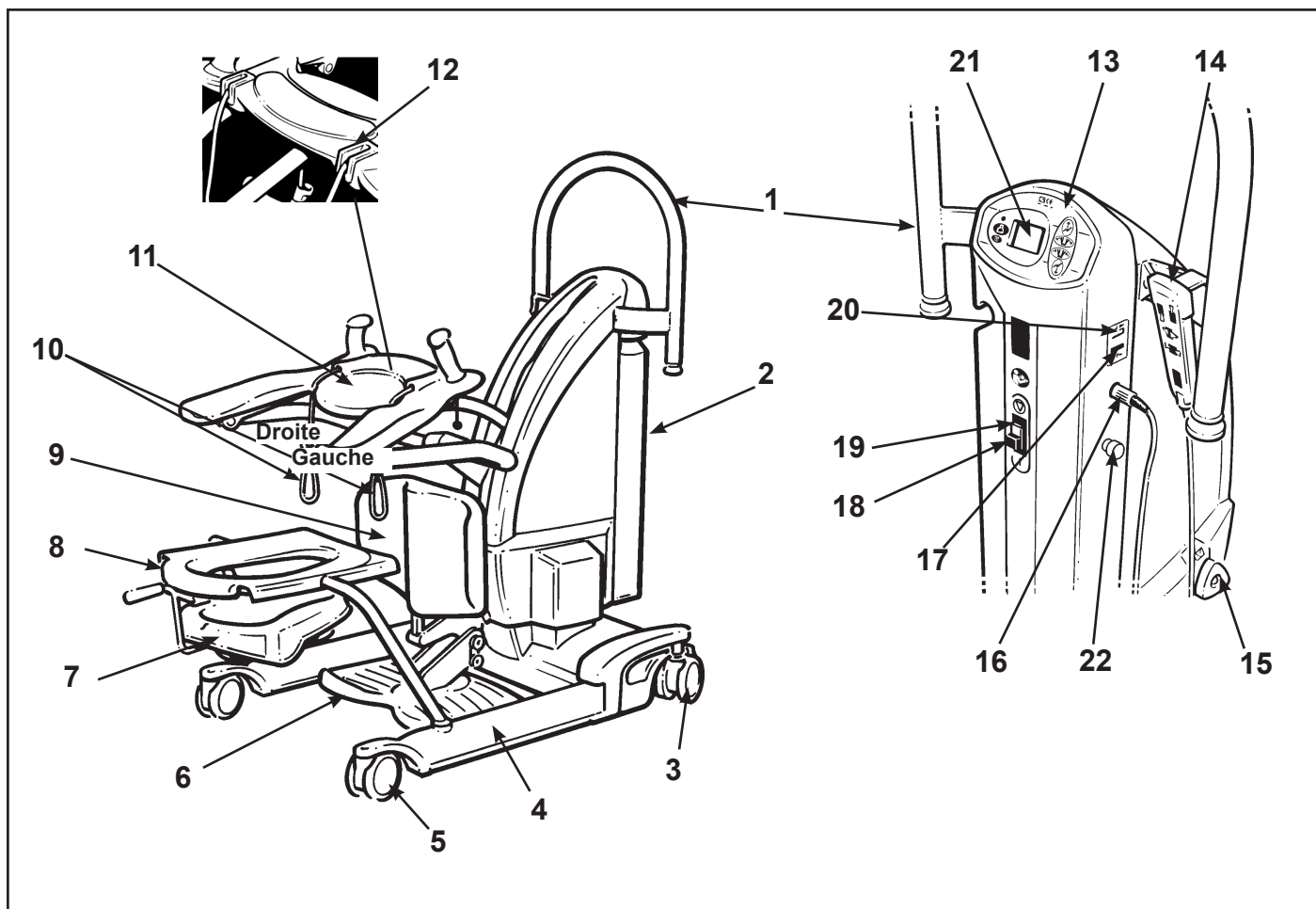

- | | |
|---|---|
| 1. Poignée de déplacement | 13. Panneau à double commande |
| 2. Bloc-batterie | 14. Télécommande |
| 3. Roues équipées de freins (arrière) | 15. Commande de descente d'urgence en cas de panne du système |
| 4. Pieds du châssis | 16. Connexion de câble de télécommande |
| 5. Roues (avant) sans frein | 17. Voyant de faible charge de batterie |
| 6. Repose-pieds (amovible) | 18. Bouton de mise sous tension / Bouton de réinitialisation (vert) |
| 7. Bassine de toilettes (facultatif) | 19. Bouton de mise hors tension (rouge) |
| 8. Siège et cadre de toilettes (facultatif) | 20. Compteur d'heures |
| 9. Proactive Pad™ (réglable) | 21. Panneau d'affichage du pèse-personne (si installé) |
| 10. Cordons de fixation du harnais | 22. Bouton d'arrêt d'urgence |
| 11. Arc-Rest™ (Accoudoirs de support avec poignées de préhension) | |
| 12. Vue détaillée des taquets de verrouillage des cordons | |

® et ™ sont des marques commerciales appartenant au groupe de sociétés Arjo.

© Arjo 2019.

Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons donc le droit d'en modifier la conception sans préavis. Il est interdit de copier, dans son intégralité ou partiellement, le contenu de cette publication sans l'autorisation d'Arjo.

