

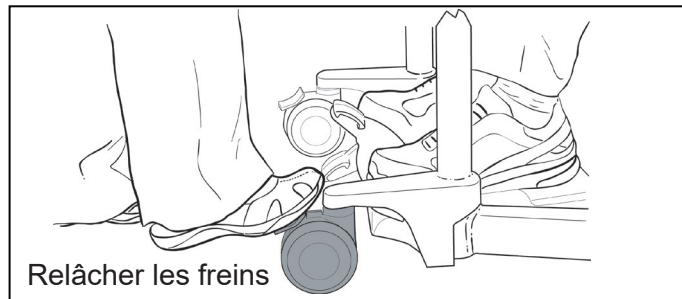
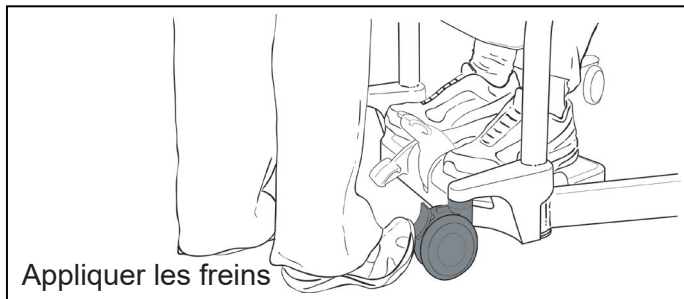




## Appliquer et relâcher le frein

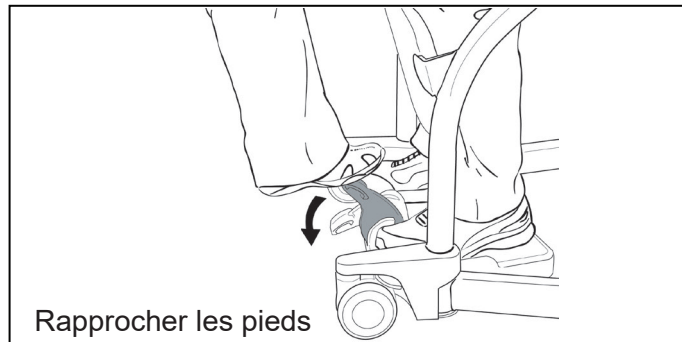



## Écarter et rapprocher les pieds

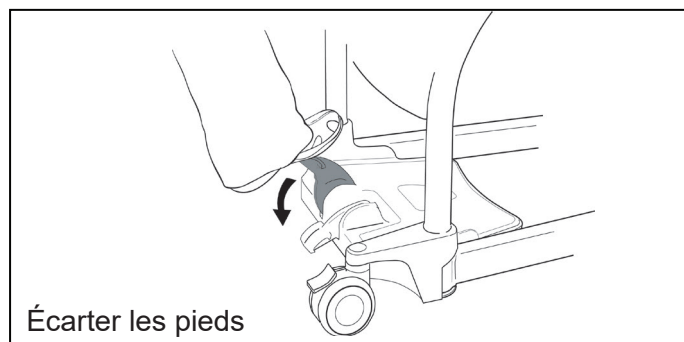

## Coussins de soutien pivotants

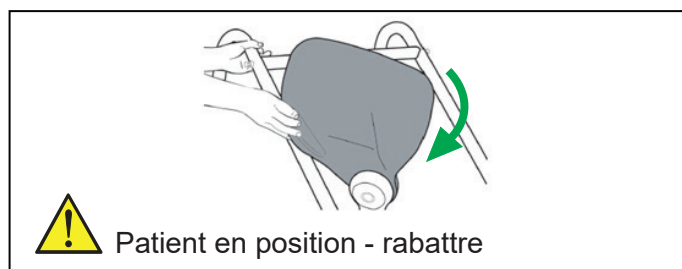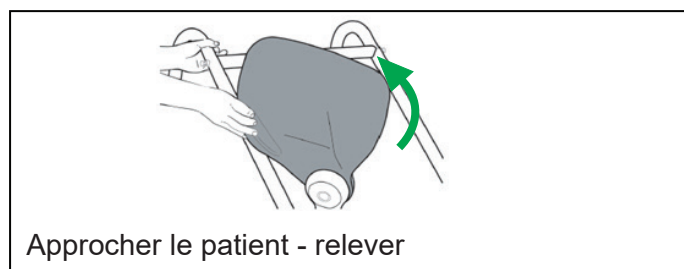

## Languettes de fixation du harnais

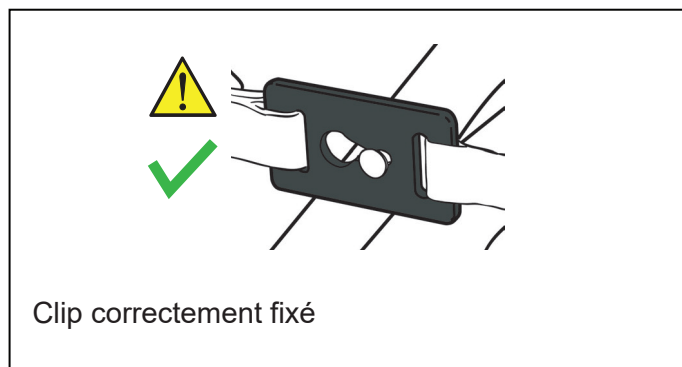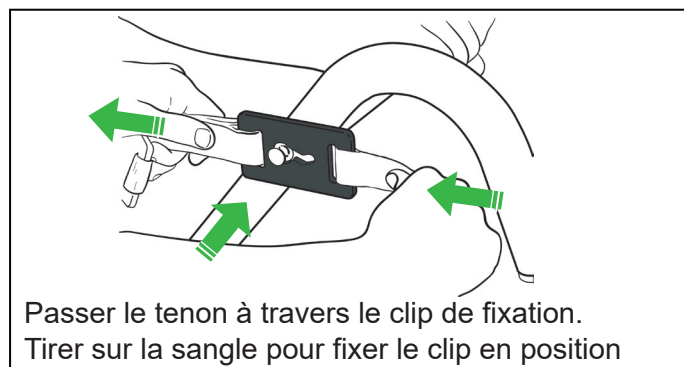

## Nettoyage et désinfection

L'essuyer avec un linge humide en utilisant de l'eau chaude et un produit désinfectant.






Des lingettes désinfectantes, imprégnées d'une solution à 70 % d'alcool isopropylique, peuvent également être utilisées. Frotter vigoureusement le lève-malade à l'aide des lingettes.

Ne pas utiliser de phénol, de chlore ou autre type de solvant susceptible de nuire à la finition de l'appareil.





# Sara Stedy / Sara Stedy Compact









## À partir d'un fauteuil

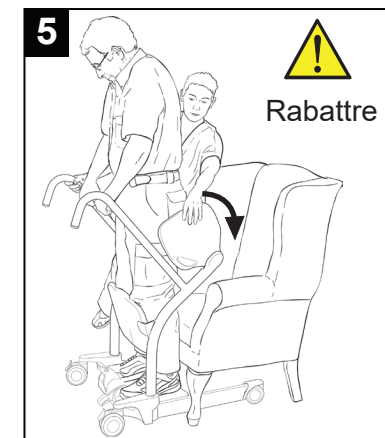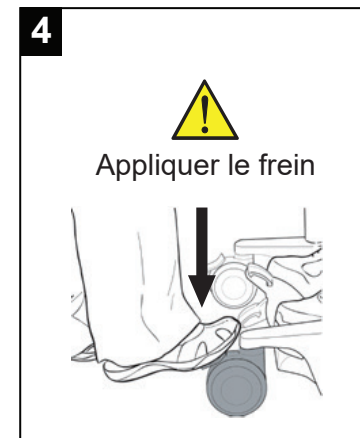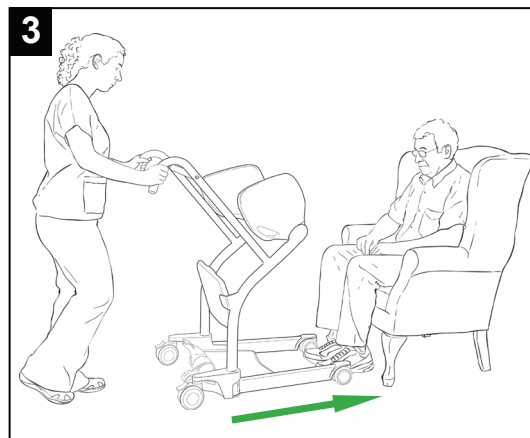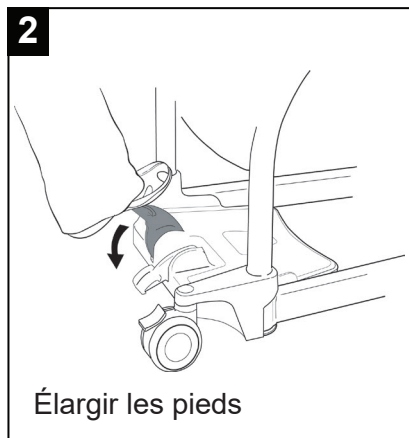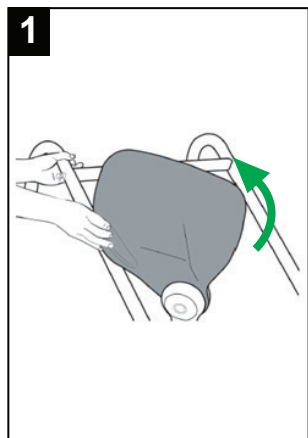

## Sangle (étapes 6 à 10 facultatives)

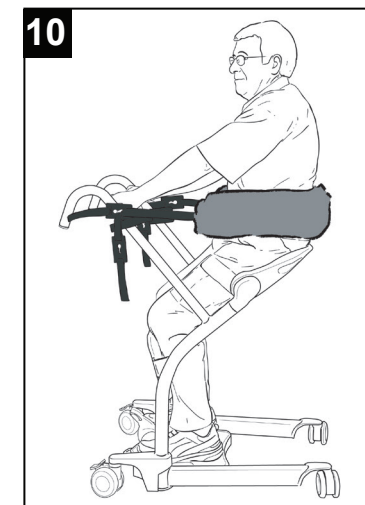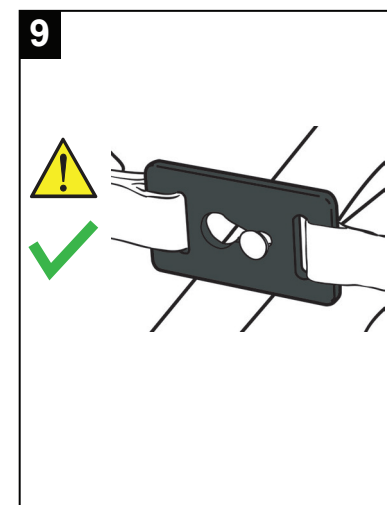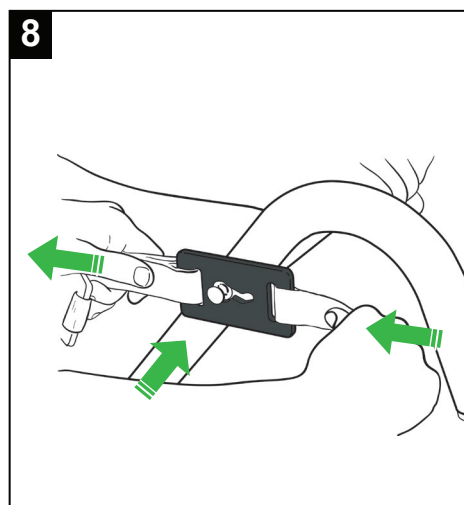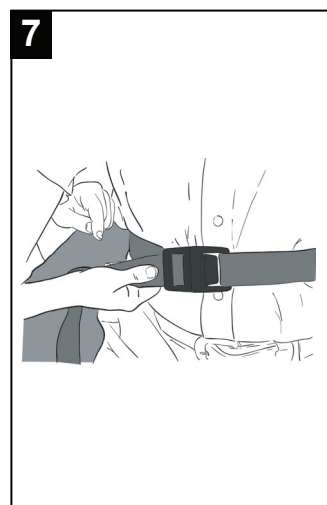

## Au fauteuil roulant

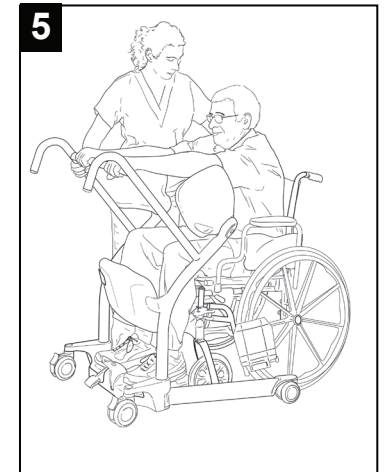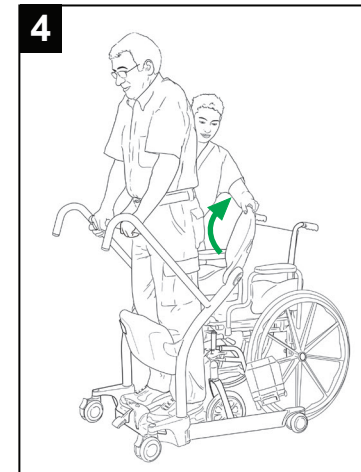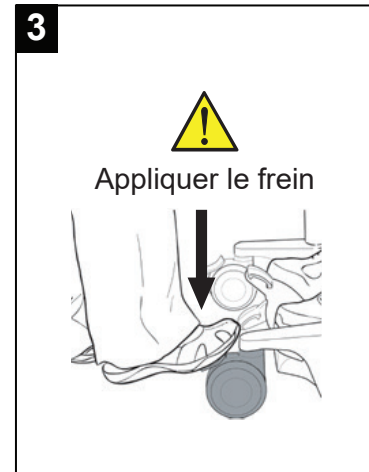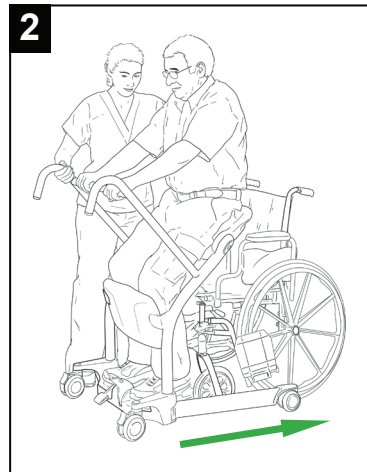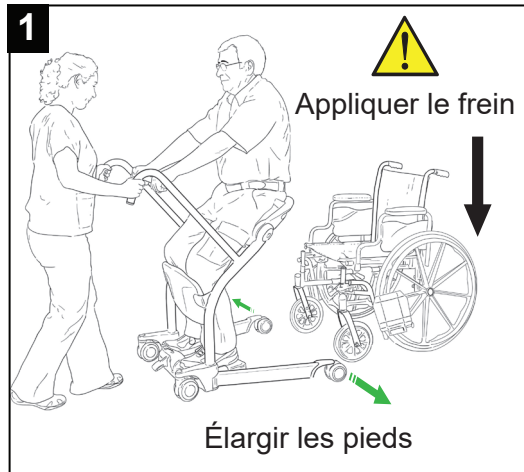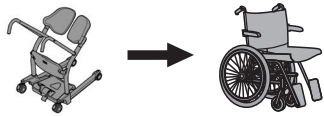

## Vers le lit

