

LIT E9X POUR PATIENTS FORTEMENT DÉPENDANTS

Enterprise 9000X



Conçu pour vous et votre patient

Le lit médicalisé Enterprise 9000X d'Arjo offre des avantages considérables au patient, au personnel soignant et à l'établissement de soins. Les défis quotidiens rencontrés par les équipes de soins infirmiers dans les services hospitaliers ont incité Arjo à améliorer une solution déjà éprouvée et reconnue par les hôpitaux du monde entier. Lors de la conception du lit médicalisé Enterprise 9000X, Arjo a mis l'accent sur les principaux besoins des clients communs à tous les environnements de soins, à savoir :

- Sécurité pour le patient et le personnel soignant.
- Conformité avec les nouvelles normes internationales.
- Équipement, robuste, intuitif et facile d'utilisation.
- Solutions axées sur la qualité des soins aux patients.

Le lit Enterprise 9000X pour les patients en soins intensifs et fortement dépendants est basé sur les principales caractéristiques des lits médicalisés Enterprise 5000X et 8000X, en accordant une attention supplémentaire à la sécurité des patients et à la fonctionnalité clinique. Le lit a été conçu en tenant compte du patient, du personnel soignant et de l'établissement, avec son système de profilage breveté, un système de pesée intégré, une alarme de sortie de lit et des capteurs anti-piégeage sous le lit.

Principales caractéristiques



PROFILAGE BIO-CONTOUR
Le système breveté Bio-Contour offre une combinaison unique de mouvements des sections du lit associée à un sommier incurvé.



3 LONGUEURS DE LIT POSSIBLES
Ce lit hospitalier permet désormais de configurer en toute simplicité différentes longueurs de lit sur un même sommier, pour une plus grande flexibilité.



VEILLEUSE DE NUIT
La zone de sortie de lit est éclairée des deux côtés grâce à une veilleuse de nuit intégrée au dessous du lit, afin d'orienter les patients au moment de quitter le lit dans une pièce mal éclairée.



PRIORITÉ À LA PRÉVENTION DES INFECTIONS
L'architecture ouverte facilite l'accès aux différents éléments et permet ainsi d'améliorer les procédures de désinfection. Les panneaux légers et lisses se retirent facilement.



SYSTÈME DE PESÉE INTÉGRÉE
Le système de pesée intégré peut supporter jusqu'à 250 kg. La pesée peut s'effectuer dans n'importe quelle position, et l'utilisation de la fonctionnalité d'auto-compensation permet d'ajouter ou d'ôter des objets sans affecter la lecture du poids du patient.



CAPTEURS ANTI-ÉCRASEMENT
Les capteurs du système anti-écrasement peuvent détecter tout objet ou toute personne se trouvant sous le lit. Si le faisceau est interrompu tandis que le sommier est abaissé, ce dernier remontera automatiquement en s'éloignant de l'obstacle, réduisant le risque de piégeage.



MAINTENANCE FACILITÉE
Conçu pour une maintenance instantanée. L'accessibilité totale et aisée permet à une personne seule dans le service de soins de changer certaines pièces telles que vérins, boîtier de commande et batterie en quelques minutes seulement.



ALARME DE SORTIE DE LIT
Lorsqu'elle est activée, la fonction de sortie de lit peut détecter les mouvements du patient à différents niveaux de sensibilité et déclencher une alarme sonore afin d'alerter le personnel médical.



POSITION CHAISE CARDIAQUE
Le personnel soignant peut facilement ajuster le lit en position de chaise cardiaque avec notre panneau de commande simple d'utilisation.



HAUTEUR EXTRA-BASSE
Un avantage majeur pour minimiser le risque de blessures liées aux chutes.



DOSSIER À 30°
Le dossier effectue automatiquement une pause de quelques secondes lorsqu'il atteint 30°, pour vous indiquer que le patient est en position physiologique optimale.



En option : IndiGo

INDIGO (EN OPTION)
IndiGo est la 5^e roue motrice qui rend le transport plus léger accessible à l'ensemble du personnel soignant d'un simple contact - pour plus de sécurité et de simplicité. IndiGo est toujours disponible et intégré directement à votre lit Citadel ou Enterprise.

DIMENSIONS	MESURES	INFORMATIONS	
Longueur standard hors tout	2 350 mm, 2 300 mm	Capacité maximale admissible/ Poids maximum du patient	250 kg / 185 kg
Largeur hors tout	1 030 mm	Configuration hors base du panneau de tête de lit	
Longueur standard du matelas	2 020 mm	Norme de sécurité	IEC60601-2-52
Largeur du matelas	880 mm		
Longueur rallongée hors tout	2 470 mm, 2 420 mm		
Longueur du matelas avec extension	2 140 mm		
Longueur courte hors tout	2 240 mm, 2 190 mm		
Longueur du matelas en position rétractée	1 910 mm		
Hauteur maximale (avec roulettes de 125 mm)	760 mm		
Hauteur minimale (avec roulettes de 125 mm)	320 mm		
Longueur section dossier	850 mm		
Longueur de l'assise	215 mm		
Longueur section jambe	560 mm		
Longueur section cuisse	365 mm		

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Indice de protection	IPX4
Protection contre les chocs	Classe 1, type B
Alimentation électrique	3 A max. à 230 V c.a. 50/60 Hz
Alimentation électrique	5,8 A max. à 120 V c.a. 60 Hz

ANGLES	DIMENSIONS
Déclive	12°
Proclive	12°
Angle du dossier	62°
Pause du dossier	30°
Angle du relève-cuisse	20°
Angle du relève-jambe	16°

POUR EN SAVOIR PLUS SUR ENTERPRISE ET INDIGO



Vidéo de démonstration de la gamme Enterprise



Vidéo de démonstration IndiGo

Octobre 2019 Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. © Arjo, 2019


Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l'âge. Avec des produits et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes. Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0)61 337 97 77
Arjo Belgium sa · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80




www.arjo.fr



Commande CPR du dossier

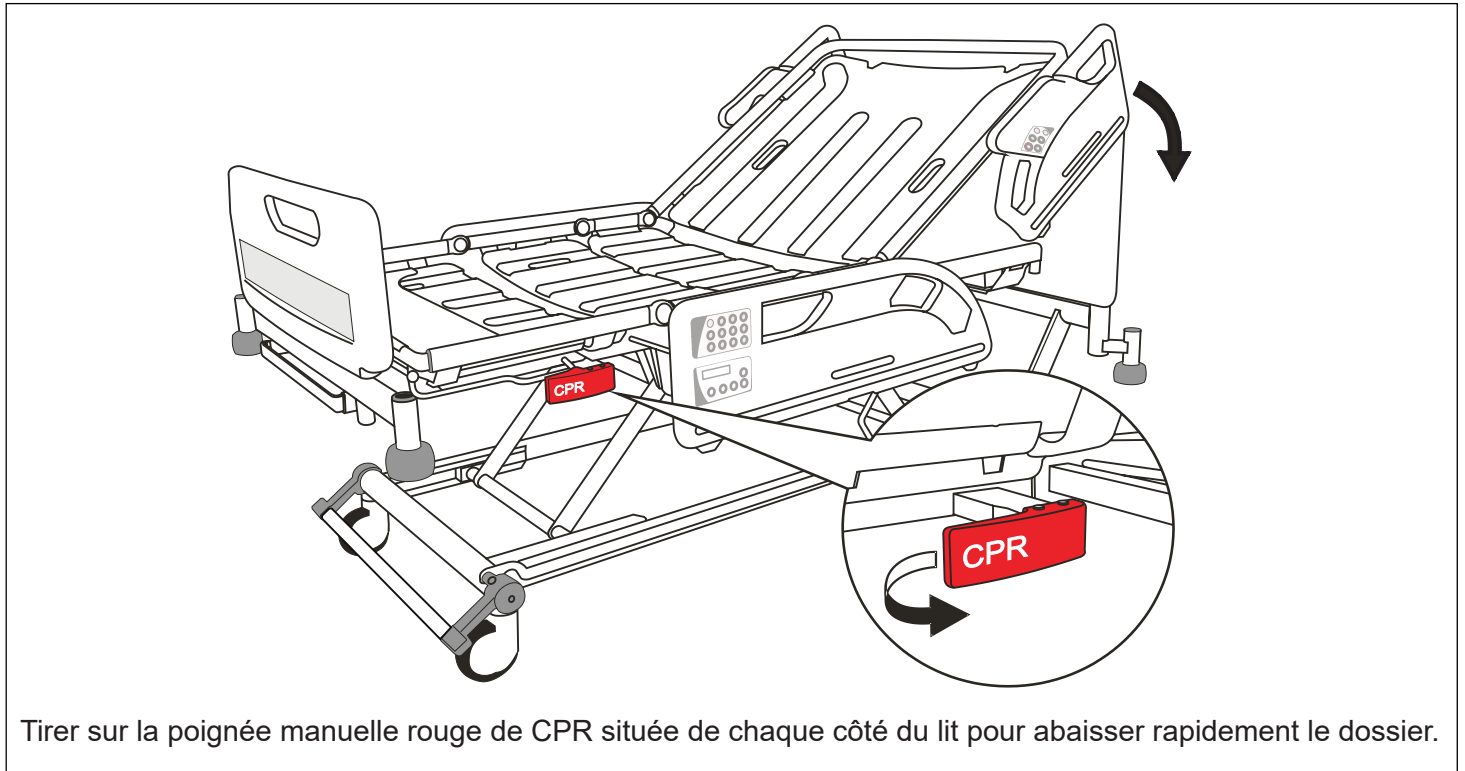


Freins et roulette directionnelle

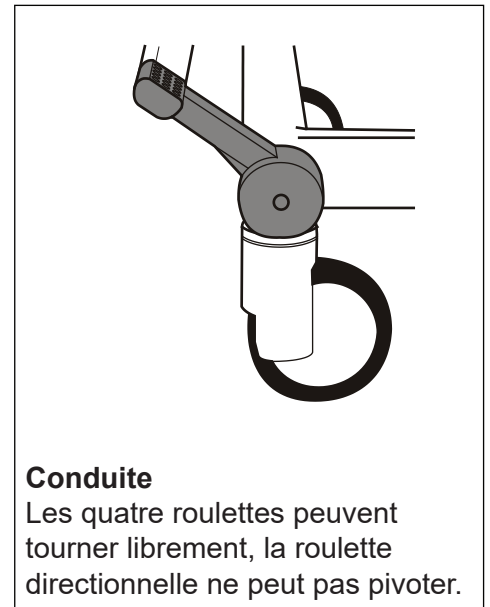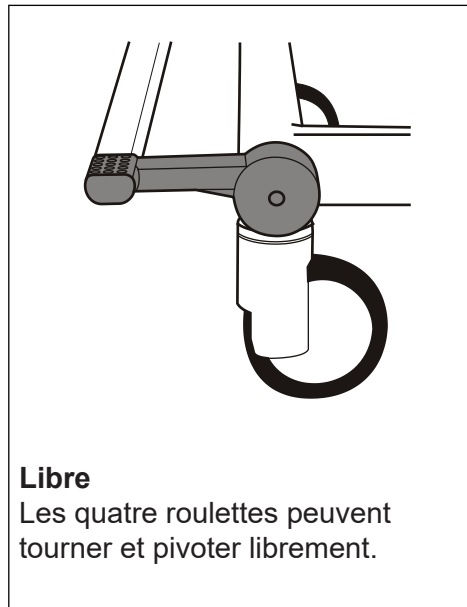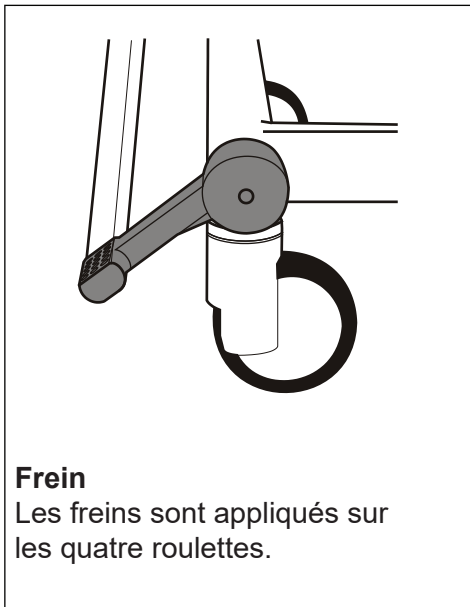

Les freins doivent être enclenchés chaque fois que le lit est en position stationnaire.

Demi-barrières latérales

1

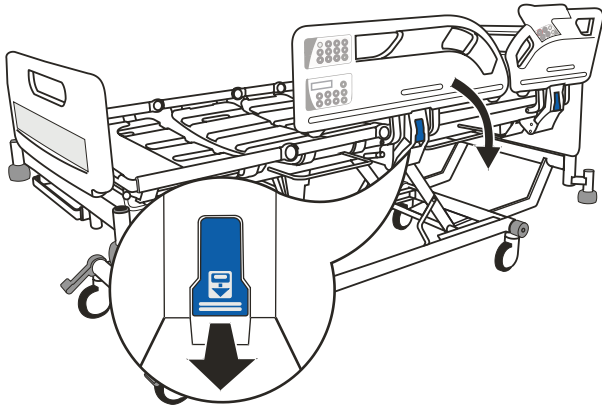


Tirer le levier de verrouillage bleu et abaisser la demi-barrière.

2




S'assurer que la demi-barrière est correctement enclenchée lorsque le lit est en position relevée.

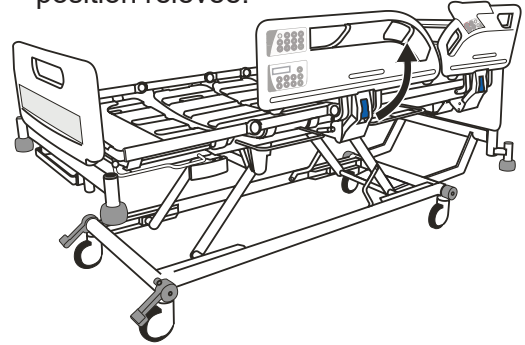

Pour la relever, tirer la demi-barrière vers le haut et la remonter en l'écartant du lit jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position relevée.


Réglage de la longueur du lit (trois positions possibles)

1

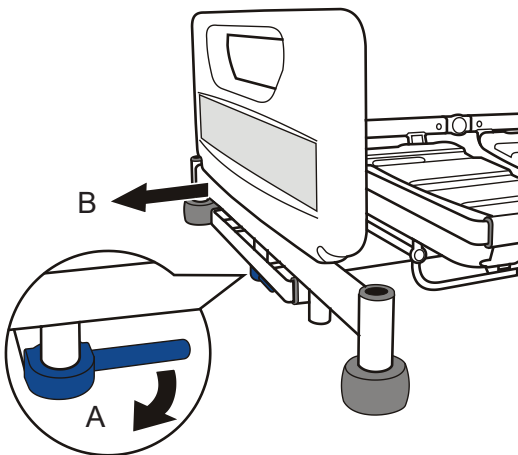

Tirer la poignée de verrouillage d'extension bleue (A). Tirer le sommier (B) jusqu'à la position requise puis relâcher la poignée.


2

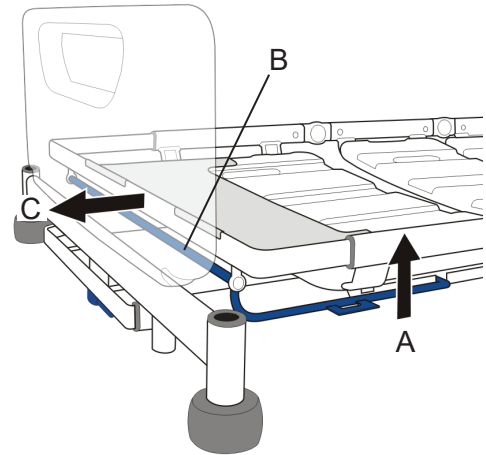

Soulever la barre d'extension bleue (A) et tenir le milieu de la barre transversale (B), puis tirer le sommier jusqu'à la position souhaitée (C).


Réglage du relève-jambes

1

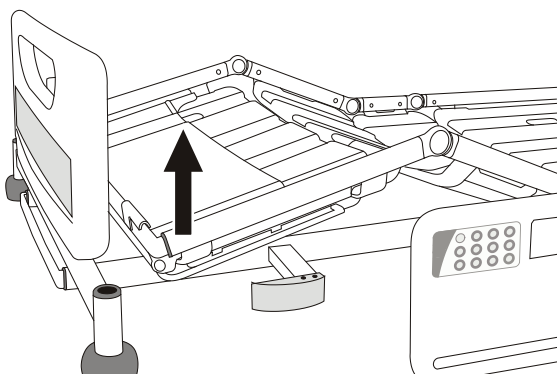

Tenir le côté du cadre du relève-jambes et relever cette section.

2

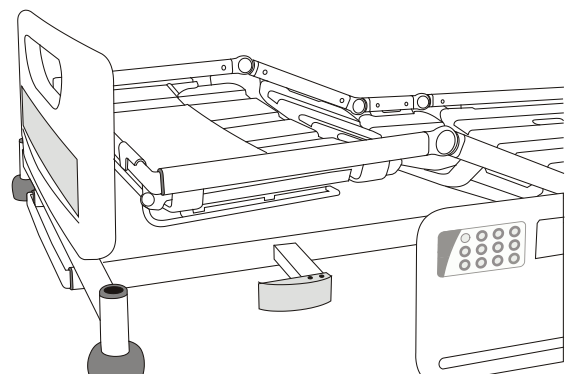


Relever jusqu'à l'enclenchement en position horizontale.


Enterprise 9000X




Panneau de commande soignant

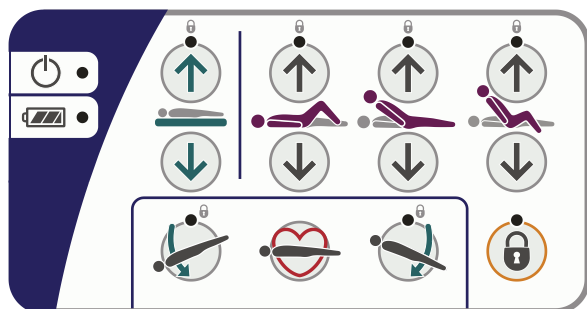


Commandes infirmier

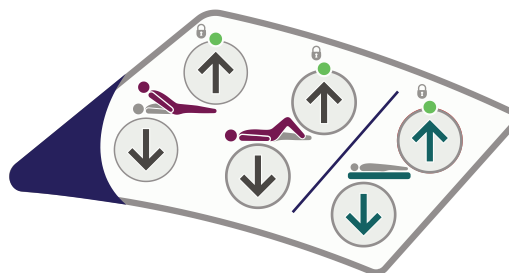

Télécommande patient

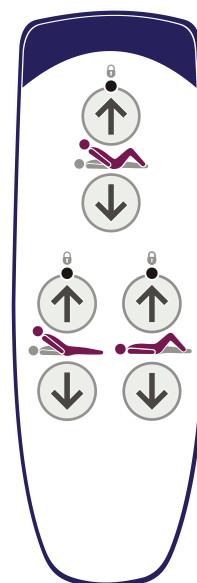

Commandes patient

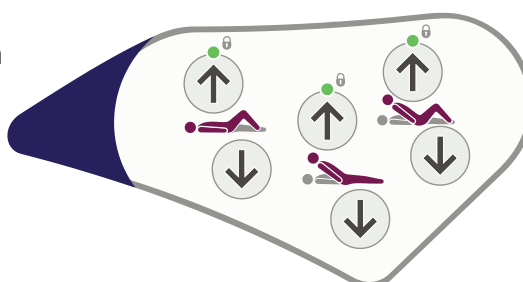

Indicateur lumineux de mise sous tension

Indicateur LED de l'état de la batterie

pleine charge

en charge

déchargé

Touche CPR - aplatir le sommier.

Extrémité inférieure de la tête (Position décline).

Extrémité inférieure des pieds (Position proclive).

Bouton de verrouillage des fonctions
– appuyer sur le bouton, puis sur le(s) bouton(s) du panneau de commande soignant correspondant à la/aux fonction(s) à verrouiller ou à déverrouiller.
Voyant de couleur jaune = verrouillé

Bouton de levage Auto-Chair
– appuyer et maintenir enfoncé pour atteindre la position du siège.

Bouton d'abaissement Auto-Chair
– retour du sommier en position horizontale.

Lever/abaisser le sommier.


Lever/abaisser la section cuisses.

Lever/abaisser le dossier.

Bouton de levage Bio-Contour (contrôle patient uniquement)
– lever les sections dossier et cuisses.

Bouton d'abaissement Bio-Contour (contrôle patient uniquement)
– retour à la position horizontale.

Commandes de pesée du patient et de détection de mouvement VariZone

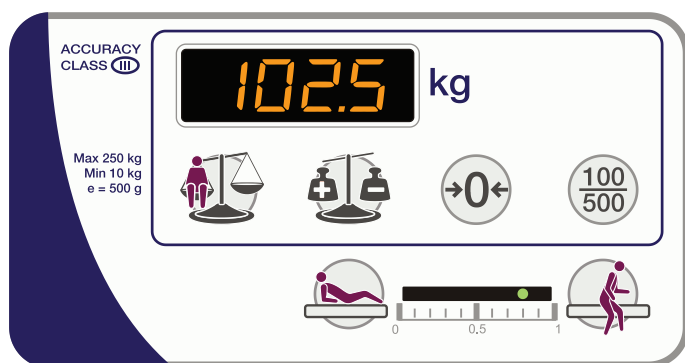

Poids – calculer et afficher le poids du patient.



Fonction Auto Compensation

– ajouter ou enlever des éléments sans affecter le poids du patient indiqué.




Zéro – réinitialiser le système de pesée.



Affichage du poids sélectif – arrondir le poids du patient à 100 g ou 500 g près.



Lit – activer/désactiver le système de détection des mouvements du patient et augmenter la sensibilité du système.

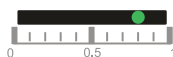

Affichage du seuil de détection des mouvements du patient

– un voyant indique l'état actuel du système et la sensibilité sélectionnée pour le système de détection des mouvements du patient.



Sortie – activer/désactiver le système de détection des mouvements du patient et augmenter la sensibilité du système.

**AVERTISSEMENT**

Débrancher le lit de l'alimentation électrique avant toute opération de nettoyage ou de maintenance. Le lit continue à fonctionner à l'aide de la batterie si la fonction n'a pas été verrouillée sur le panneau de commande soignant.

Ne jamais mouiller la fiche ou le cordon d'alimentation électrique.

ATTENTION

Ne pas utiliser de tampons abrasifs ou de composés abrasifs, ni de désinfectants à base de phénol.

Ne pas recourir au nettoyage à jet de vapeur ou par tunnel de lavage.

Ne pas retirer la graisse des vérins.

Nettoyer et désinfecter chaque semaine.

Nettoyer et désinfecter avant chaque nouveau patient.

Accessoires nécessaires :

- Vêtements de protection
- Solution détergente neutre
- Dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) à 1 000 ppm (0,1 %) de chlore disponible
- Dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) à 10 000 ppm (1 %) de chlore disponible
- Eau chaude
- Linge jetable
- Serviettes en papier jetables

Le dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) est recommandé en tant que désinfectant. Si les protocoles de l'établissement requièrent l'utilisation d'un désinfectant autre que le NaDCC, procéder avec précaution conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyage


1. Retirer le matelas et tous les accessoires du lit.
2. Retirer la tête de lit, le pied de lit et les plaques du sommier du lit.
3. Nettoyer toutes les surfaces avec un linge jetable imprégné d'eau et de solution détergente neutre. Commencer par les sections supérieures du lit et toutes les surfaces horizontales. Poursuivre méthodiquement en direction des sections inférieures du lit et terminer par les roulettes.
4. Essuyer avec un nouveau linge jetable imprégné d'eau. Sécher avec des serviettes en papier jetables.
5. Avant de replacer le matelas, veiller à bien sécher les parties nettoyées.

Désinfection




6. Essuyer toutes les surfaces avec du NaDCC (1 000 ppm de chlore disponible). Pour les fluides corporels, tels que le sang, essuyer avec du NaDCC (10 000 ppm de chlore disponible).



Commande CPR du dossier

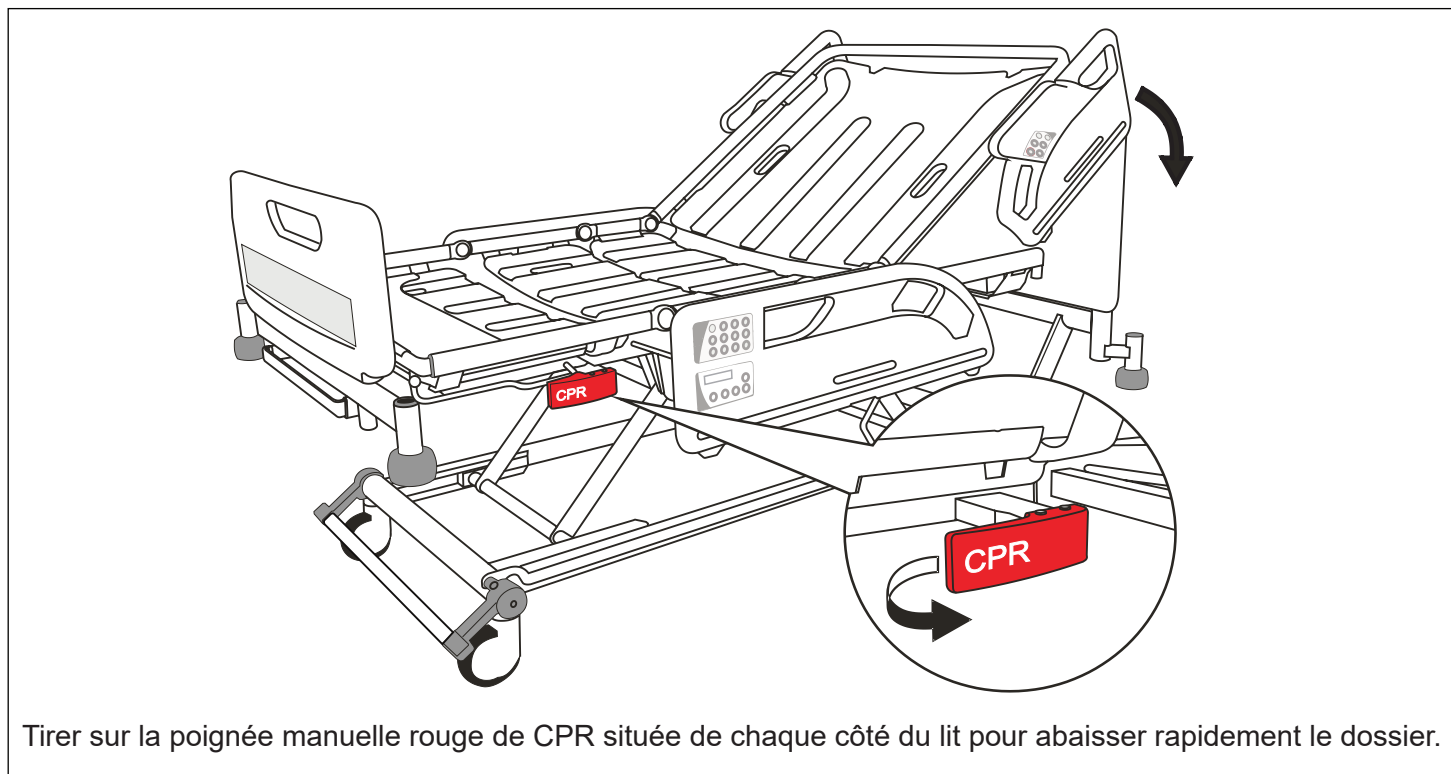


Freins et roulette directionnelle

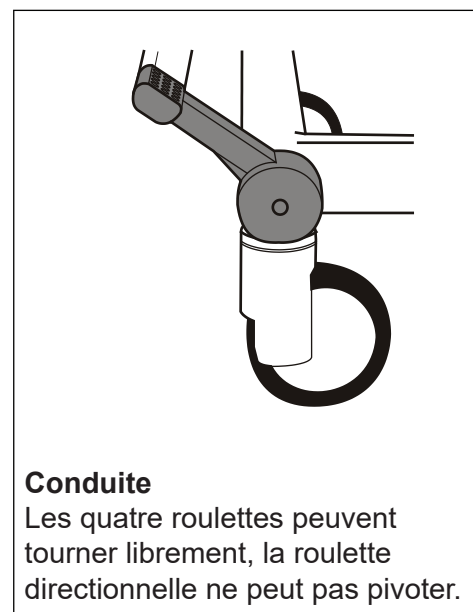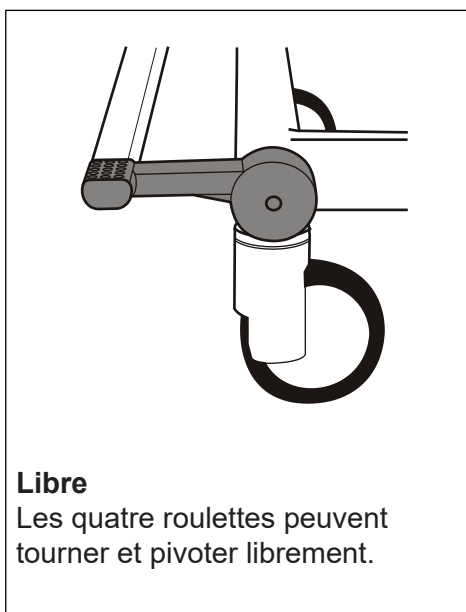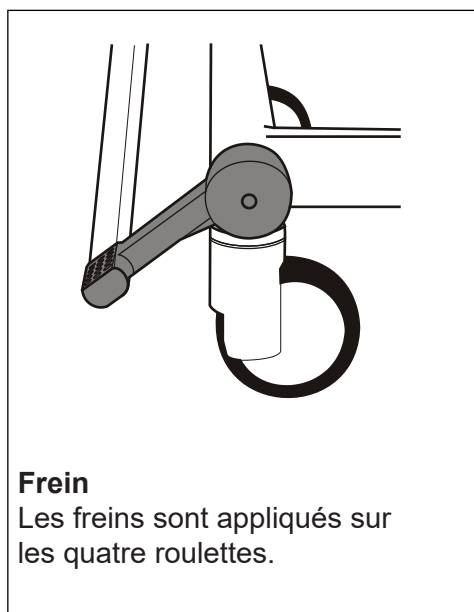

Les freins doivent être enclenchés chaque fois que le lit est en position stationnaire.

Demi-barrières latérales

1

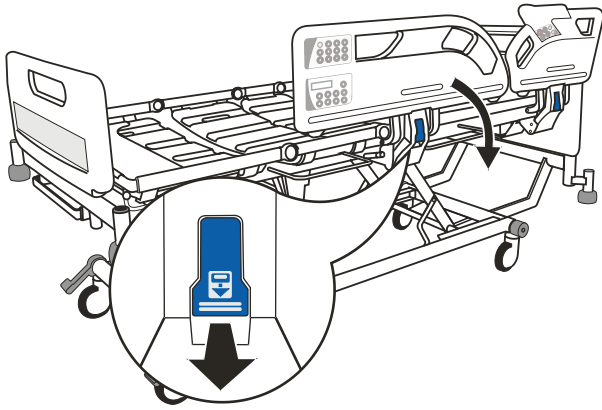


Tirer le levier de verrouillage bleu et abaisser la demi-barrière.

2




S'assurer que la demi-barrière est correctement enclenchée lorsque le lit est en position relevée.

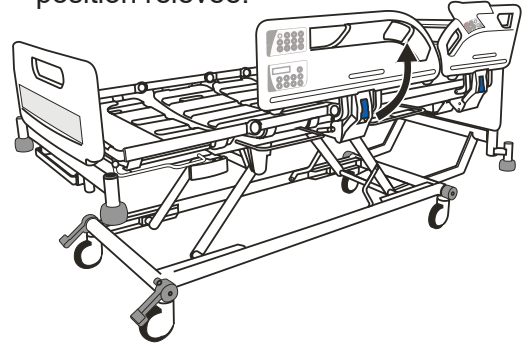

Pour la relever, tirer la demi-barrière vers le haut et la remonter en l'écartant du lit jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position relevée.


Réglage de la longueur du lit (trois positions possibles)

1

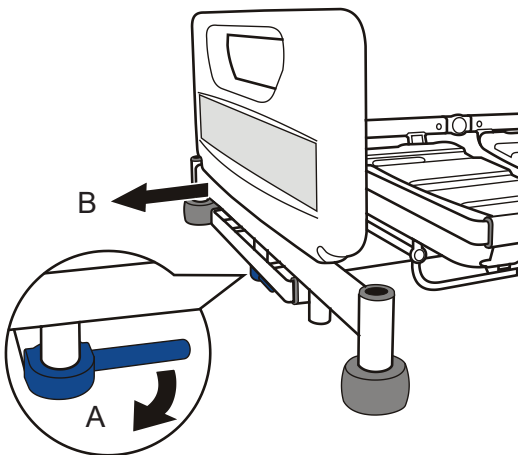

Tirer la poignée de verrouillage d'extension bleue (A). Tirer le sommier (B) jusqu'à la position requise puis relâcher la poignée.


2

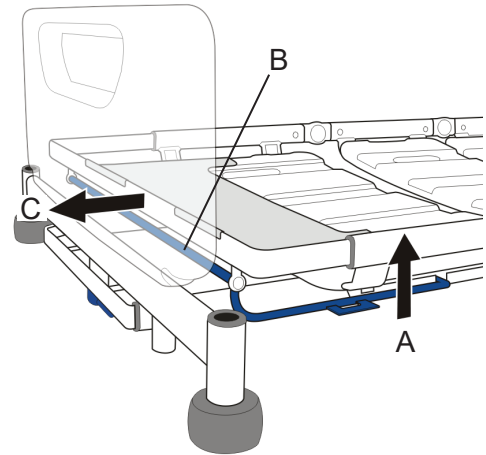

Soulever la barre d'extension bleue (A) et tenir le milieu de la barre transversale (B), puis tirer le sommier jusqu'à la position souhaitée (C).


Réglage du relève-jambes

1

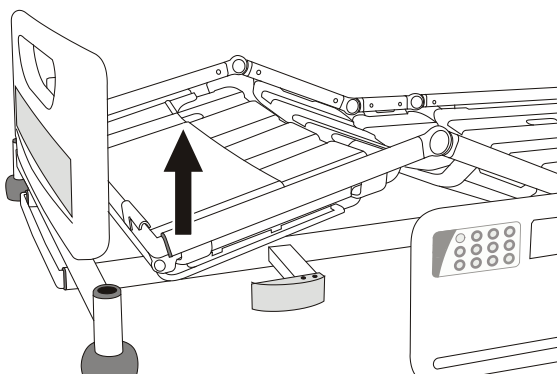

Tenir le côté du cadre du relève-jambes et relever cette section.

2

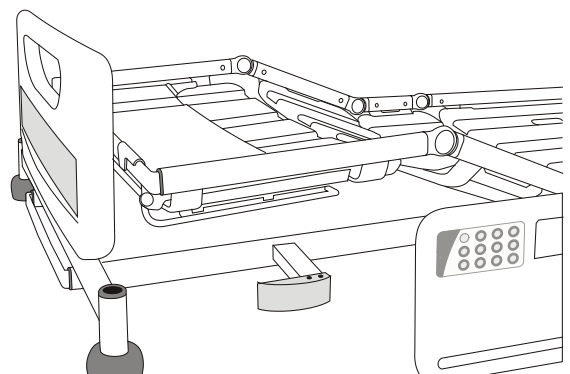

Relever jusqu'à l'enclenchement en position horizontale.



AVERTISSEMENT

Débrancher le lit de l'alimentation électrique avant toute opération de nettoyage ou de maintenance. Le lit continue à fonctionner à l'aide de la batterie si la fonction n'a pas été verrouillée sur le panneau de commande soignant.

Ne jamais mouiller la fiche ou le cordon d'alimentation électrique.

ATTENTION

Ne pas utiliser de tampons abrasifs ou de composés abrasifs, ni de désinfectants à base de phénol.

Ne pas recourir au nettoyage à jet de vapeur ou par tunnel de lavage.

Ne pas retirer la graisse des vérins.

Nettoyer et désinfecter chaque semaine.

Nettoyer et désinfecter avant chaque nouveau patient.

Accessoires nécessaires :

- Vêtements de protection
- Solution détergente neutre
- Dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) à 1 000 ppm (0,1 %) de chlore disponible
- Dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) à 10 000 ppm (1 %) de chlore disponible
- Eau chaude
- Linge jetable
- Serviettes en papier jetables

Le dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) est recommandé en tant que désinfectant. Si les protocoles de l'établissement requièrent l'utilisation d'un désinfectant autre que le NaDCC, procéder avec précaution conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyage

1. Retirer le matelas et tous les accessoires du lit.
2. Retirer la tête de lit, le pied de lit et les plaques du sommier du lit.
3. Nettoyer toutes les surfaces avec un linge jetable imprégné d'eau et de solution détergente neutre. Commencer par les sections supérieures du lit et toutes les surfaces horizontales. Poursuivre méthodiquement en direction des sections inférieures du lit et terminer par les roulettes.
4. Essuyer avec un nouveau linge jetable imprégné d'eau. Sécher avec des serviettes en papier jetables.
5. Avant de replacer le matelas, veiller à bien sécher les parties nettoyées.

Désinfection

6. Essuyer toutes les surfaces avec du NaDCC (1 000 ppm de chlore disponible). Pour les fluides corporels, tels que le sang, essuyer avec du NaDCC (10 000 ppm de chlore disponible).

Protocole d'intubation


En utilisant les fonctions électriques des lits

But : améliorer l'accès aux voies respiratoires en utilisant les fonctionnalités du lit

PROCÉDURE D'INTUBATION TRADITIONNELLE (en ôtant le panneau de tête)




1. Enlever le panneau de tête du lit pour libérer l'accès au soignant au niveau des voies respiratoires du patient.
2. Élever le lit pour travailler de manière plus ergonomique, à la bonne hauteur pour intuber le patient. Pour cela, utiliser les boutons suivants du panneau de commandes :

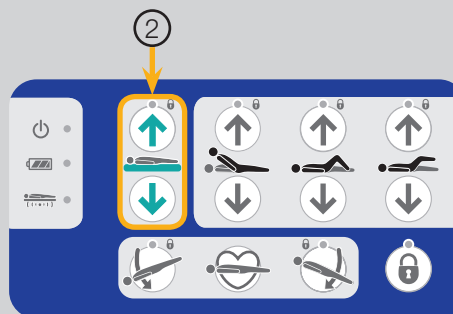

ALTERNATIVE D'INTUBATION (pour panneau de tête de lit fixe)



1. Laisser le panneau de tête pour qu'il puisse servir de support pour le soignant lors de la procédure d'intubation.
2. Élever le lit pour travailler de manière plus ergonomique, à la bonne hauteur pour intuber le patient. Pour cela, utiliser les boutons suivants du panneau de commandes :

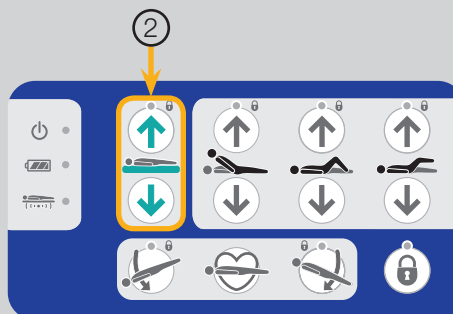

AUTRE MANIÈRE D'AMÉLIORER L'ACCÈS AUX VOIES RESPIRATOIRES




1. Incliner le relève-buste à 10°.



2. Positionner le lit en déclive pour que le buste et la tête du patient soient en position horizontale.



3. Élever le lit pour travailler de manière plus ergonomique, à la bonne hauteur pour intuber le patient. Le panneau de tête peut être laissé si le soignant le souhaite.

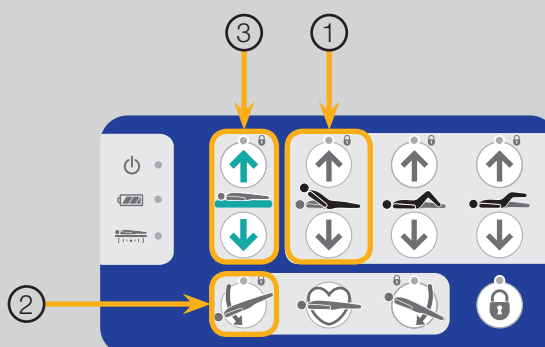

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP

Seules des pièces ArjoHuntleigh, spécialement conçues à cet effet, doivent être utilisées sur les équipements et produits fournis par ArjoHuntleigh. Dans le cadre de notre politique d'améliorations continues, nous nous réservons le droit de modifier la conception de nos produits ainsi que leurs caractéristiques techniques sans avis préalable.

Flites, Maxi Sky¹⁰⁰⁰, Tailor Made Slings et Tenor sont des marques commerciales appartenant au groupe de sociétés ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2015

ArjoHuntleigh, 2 Avenue Alcide de Gasperi, CS 70133, 59436 Roncq, France
Tél : 03 20 28 13 13
Fax : 03 20 28 13 14
info.france@arjohuntleigh.com

www.ArjoHuntleigh.fr

GETINGE GROUP

Getinge Group est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes contribuant à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous regroupons nos activités sous les trois marques **ArjoHuntleigh**, **Getinge** et **Maquet**. **ArjoHuntleigh** se consacre à la mobilité des patients et au traitement des plaies. **Getinge** propose des solutions de lutte contre les infections dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie. **Maquet** se spécialise dans les traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales, à la cardiologie interventionnelle et aux soins intensifs.

Les lits sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par ArjoHuntleigh. Ils sont destinés à un usage médical pour assister le patient et le personnel soignant lors des soins de routine. Lisez attentivement la notice d'utilisation.