



<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>



# Prévention des infections croisées

## Instructions de nettoyage pour Miranti:

Placer Miranti de préférence audessus de la baignoire. Retirer le repositête, le coussin de cuisses et la poignée de sécurité et les placer au fond de la baignoire.

### CAUTION!

Ne pas utiliser de phénol, d'acide citrique, de solvants à base de pétrole, de trichloréthylène ou d'autres détergents susceptibles de détériorer le plastique. Ne pas utiliser la stérilisation à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène.

- 1 Utiliser le système de désinfection de la baignoire. Il est également possible d'utiliser un pulvérisateur ordinaire rempli de désinfectant liquide dilué selon les instructions indiquées sur le récipient de désinfectant.

**IMPORTANT!** Le désinfectant est un liquide concentré – il est très important de respecter le rapport de dilution recommandé.

- 2 Pulvériser le désinfectant et brosser toutes les parties du fauteuil qui a été abaissé dans l'eau. Assurez vous de nettoyer toutes les surfaces et apportez une attention particulière aux charnières sans oublier le dessous du brancard. Utiliser un chiffon ou un vieux tissu.
- 3 Laisser le désinfectant agir pour permettre une désinfection complète. En cas d'utilisation d'une autre solution désinfectante, se référer aux instructions sur le récipient pour le temps de contact recommandé.
- 4 Rincer soigneusement avec de l'eau. Ne pas oublier la partie sous le brancard. La température de l'eau ne doit pas dépasser 60 °C (140 °F).
- 5 Sécher toutes les parties avec un chiffon doux.

