



Commande CPR du dossier

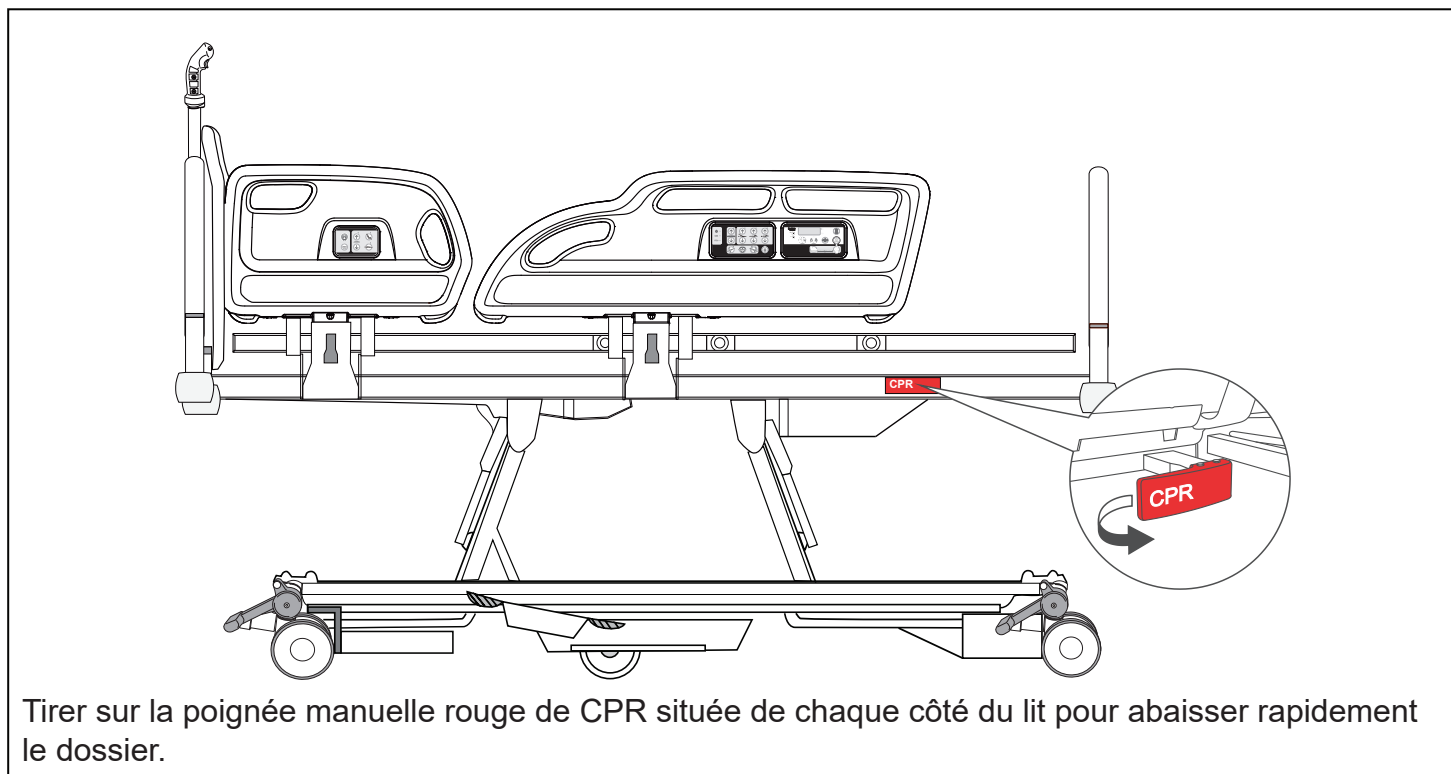


Freins et roulette directionnelle

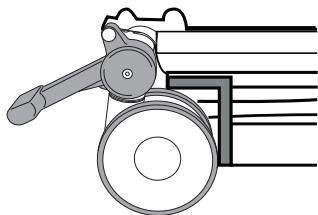


Frein

Les freins sont appliqués sur les quatre roulettes.

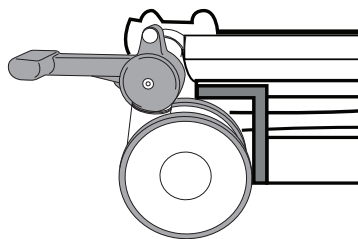

Libre

Les quatre roulettes peuvent tourner et pivoter librement.

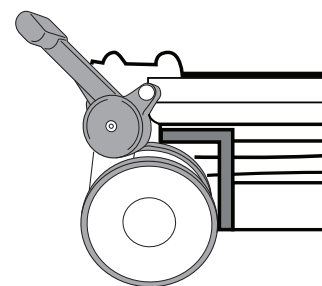

Conduite


Les quatre roulettes peuvent tourner librement, la roulette directionnelle ne peut pas pivoter.

Les freins doivent être enclenchés chaque fois que le lit est en position stationnaire.

Demi-barrières latérales



S'assurer que le mécanisme de blocage est correctement enclenché lorsque les barrières de lit sont relevées.

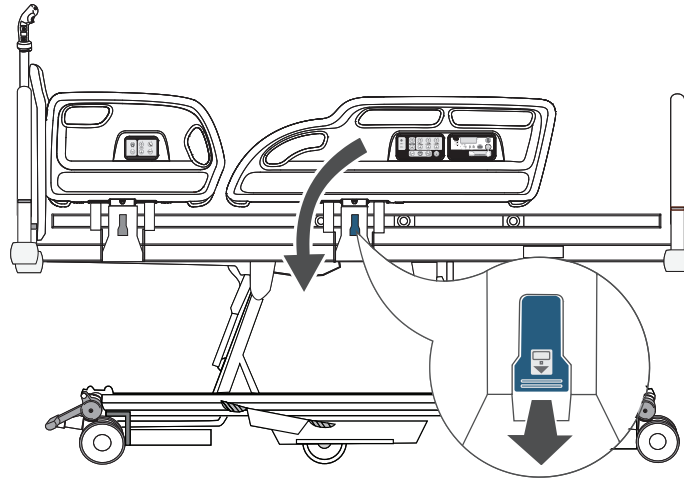


Tirer le levier de verrouillage bleu et abaisser la demi-barrière.

Pour la relever, tirer la demi-barrière vers le haut et la remonter en l'écartant du lit jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position relevée.


Réglage de la longueur du lit (trois positions possibles)

1

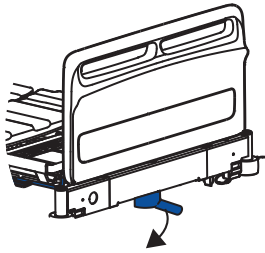


Tirer la poignée de verrouillage d'extension bleue.

2

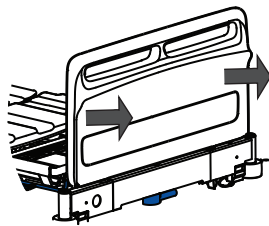


Tirer le sommier jusqu'à la position requise, puis relâcher la poignée.

3

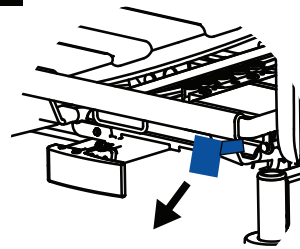

Tirer la poignée d'extension bleue.


4

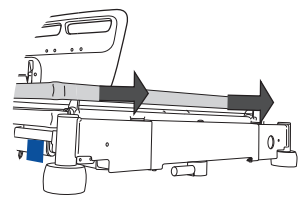

Tirer le sommier dans la position souhaitée.


Réglage de la largeur du lit

1

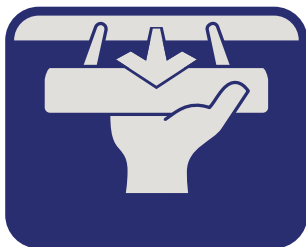

Repérer les loquets d'extension de largeur situés derrière le symbole d'extension (quatre de chaque côté).

2

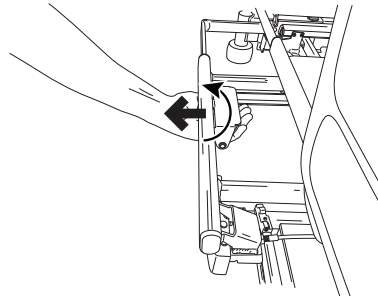




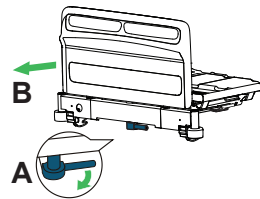
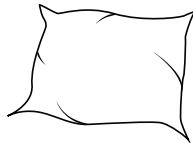

Appuyer sur le loquet d'extension pour déverrouiller et tirer sur la section jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée.






3

Veiller à répéter cette étape pour tous les loquets d'extension.



Citadel Plus

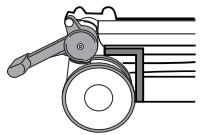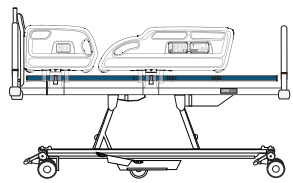Positionnement du patient - préparation
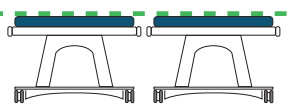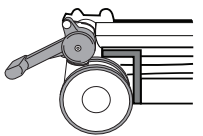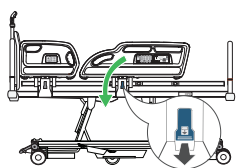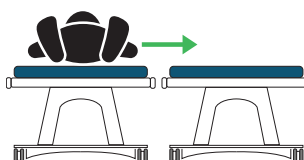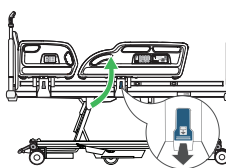
<p>1</p>  <p>Serrer les freins des roulettes.</p>	<p>2</p>  <p>Placer le support thérapeutique à l'horizontale.</p>	<p>3</p>  <p>Régler le lit à une hauteur de travail confortable.</p>	<p>4</p>  <p>Procéder à l'extension du châssis et du sommier si nécessaire.</p>	<p>5</p>  <p>Ajouter des oreillers, des couvertures et d'autres accessoires.</p>	<p>6</p>  <p>Appuyer sur le bouton Zéro pour remettre le système de pesée à zéro.</p>
---	---	--	---	--	---

<p>7</p>  <p>Régler la hauteur de la surface du patient au même niveau que la surface de transfert du patient.</p>	<p>8</p>  <p>Serrer les freins de toutes les roulettes.</p>	<p>9</p>  <p>Abaisser les barrières latérales.</p>	<p>10</p>  <p>Transférer le patient, conformément à toutes les règles de sécurité et les protocoles de l'établissement.</p>	<p>11</p>  <p>Lever et verrouiller toutes les barrières latérales.</p>
--	--	--	--	---

Pesage du patient

<p> Usage non destiné au dosage des médicaments.</p>  <p>Peser le patient si nécessaire.</p>

Positionnement du patient - exécution

1




Appuyer sur le bouton Lit ou la touche Sortie pour activer le système et assigner la valeur choisie pour la sensibilité du système VariZone de détection des mouvements du patient.

2



Ramener le lit au niveau fonctionnel le plus bas de façon à assurer le confort du patient.

3

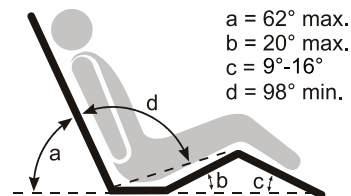

Amener le lit à l'angle souhaité de façon à assurer le confort du patient.


4



Verrouiller les fonctions du lit si nécessaire.


Transfert du patient depuis le lit

1

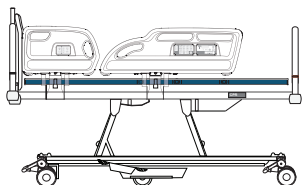


Placer le support thérapeutique à l'horizontale.

2

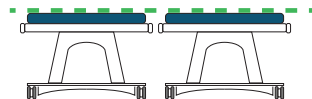


Régler la hauteur de la surface du patient au même niveau que la surface de transfert du patient.

3

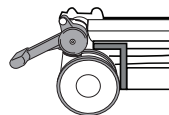


Serrer les freins de toutes les roulettes.

4

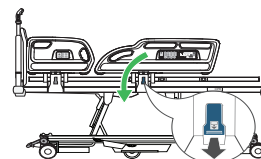

Abaisser les barrières latérales.

5

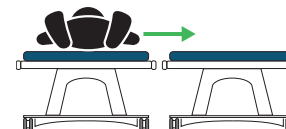

Transférer le patient en observant l'ensemble des règles de sécurité et protocoles de l'établissement en vigueur.


6



Si le patient ne retourne pas au lit :
- Débrancher le cordon d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation de la batterie.
- Mettre la batterie hors tension et éteindre toutes les fonctions du lit.


Transport du patient

1

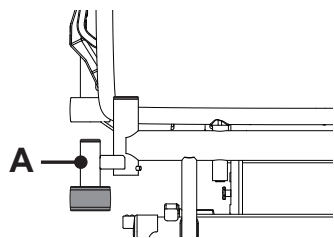

Placer la poche à perfusion du patient sur la tige porte-sérum si nécessaire.

2

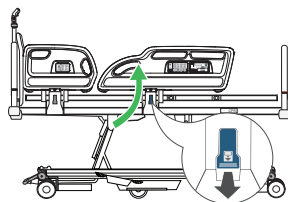


Soulever et verrouiller les barrières latérales.

3




Rétracter toutes les extensions de largeur avant de procéder au transport.

4

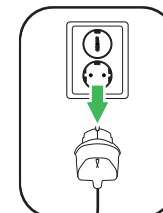


Débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

5

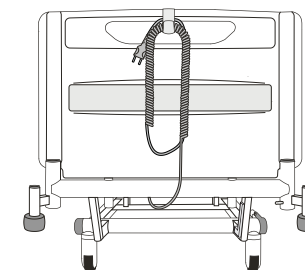

Enrouler le cordon sur les supports situés à la tête du lit.

6

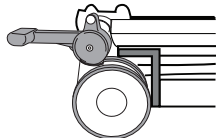


Desserrer les freins.

7




Utiliser le système d'assistance motorisé pour faciliter le transport.

8

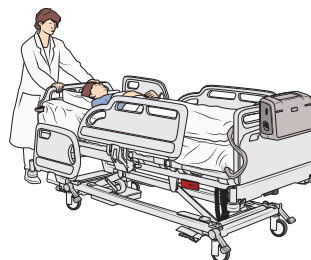

Transporter le patient en respectant l'ensemble des règles de sécurité et protocoles de l'établissement en vigueur.

9

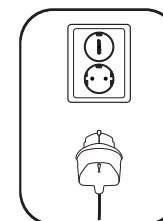


Brancher le cordon d'alimentation sur une prise murale après avoir transporté le patient.


Citadel Plus




Panneau de commande soignant

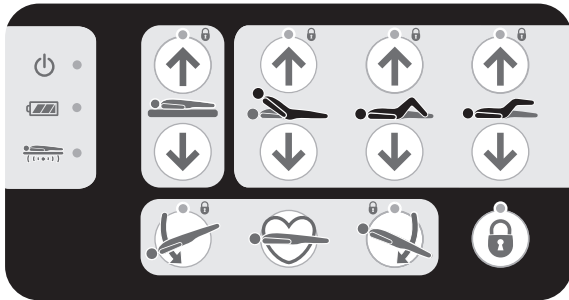


Panneau de commande personnel infirmier

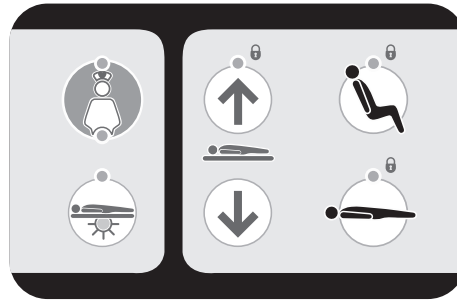

Télécommande patient

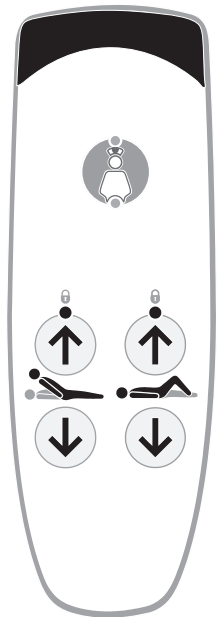

Panneau de commande patient

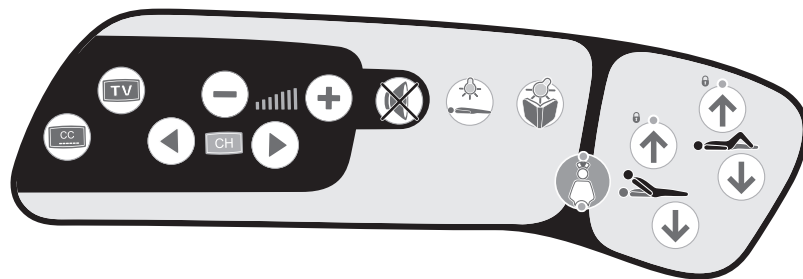

● Indicateur de mise sous tension



● Indicateur LED de l'état de la batterie



● Batterie totalement chargée



● Batterie en charge



● Batterie déchargée



● **Indicateur de système anti-piégeage (AES)**
– S'il est allumé, le système AES a été activé et l'obstruction doit être éliminée avant que le cadre ne s'abaisse.



Hauteur du sommier – Élever ou abaisser le sommier.



Angle du dossier – Élever et abaisser le dossier.



Section cuisses – Élever et abaisser la section cuisses.

Section mollets – Élever et abaisser la section mollets.



Extrémité inférieure de la tête
(Position déclive)



Extrémité inférieure des pieds
(Position proclive)



Position CPR – Aplatir le sommier et abaisser le lit.



Verrouillage des fonctions – Appuyer sur le bouton, puis sur le(s) bouton(s) du panneau de commande soignant correspondant à la/aux fonction(s) à verrouiller ou à déverrouiller. Voyant jaune = verrouillé.



Auto-Chair

(panneau de commande infirmier uniquement)
– Appuyer et maintenir enfoncé pour atteindre la position de siège.



Abaissement Auto-Chair

(panneau de commande infirmier uniquement)
– Appuyer et maintenir enfoncé pour revenir à la position horizontale.



Veilleuse sous le lit

(panneau de commande infirmier uniquement)



APPEL INFIRMIER

(disponible sur les modèles sélectionnés) – Appuyer pour demander de l'aide.



Veilleuse

(disponible sur les modèles sélectionnés) – Appuyer pour allumer la lumière.



Veilleuse allumée/éteinte

(disponible sur les modèles sélectionnés)



Son marche/arrêt (silencieux)

(disponible sur les modèles sélectionnés)



Diminution du volume

(disponible sur les modèles sélectionnés)



Augmentation du volume

(disponible sur les modèles sélectionnés)



Chaîne précédente

(disponible sur les modèles sélectionnés)



Chaîne suivante

(disponible sur les modèles sélectionnés)



Télévision marche/arrêt



(disponible sur les modèles sélectionnés)



Sous-titrage marche/arrêt

(disponible sur les modèles sélectionnés)

Panneau de commande du système de pesée

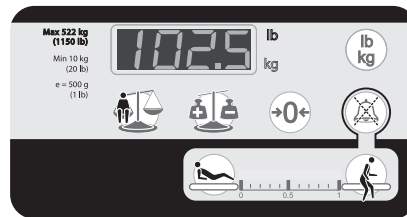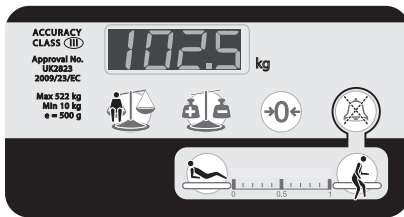

Remise à Zéro – Appuyer pour remettre à zéro le système de pesée lors de la première installation du lit ou avant qu'un nouveau patient n'y prenne place.



Auto Compensation – Appuyer pour ajouter ou enlever des éléments du lit sans modifier le poids indiqué du patient.



Poids – Appuyer pour afficher le poids.



Sélection des unités – Appuyer pour sélectionner l'unité de pesage.



Bouton silence VariZone – Appuyer pour couper le son de l'alarme de sortie de lit pendant trois minutes.

Seuil de détection des mouvements du patient

– Un indicateur indique la sensibilité sélectionnée des mouvements du patient.



Lit – Appuyer pour réactiver ou activer le système de détection des mouvements du patient et augmenter la sensibilité.



Sortie – Appuyer pour réactiver ou activer le système de détection des mouvements du patient et diminuer la sensibilité.

Motorisation du CITADEL PLUS




Destiné à l'aide à la conduite et au brancardage du lit

⚠ À FAIRE AVANT CHAQUE TRANSPORT

1/ Je débranche et je range le cordon d'alimentation

2/ J'enlève les freins et je mets les roues en position neutre

3/ J'appuie sur la pédale latérale qui active la 5^{ème} roue motorisée

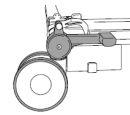


Comment démarrer la 5^{ème} roue motorisée ?

⚠ Régler la hauteur du lit pour déplacer le lit dans une posture ergonomique

1/ Sortie de veille. J'appuie 1 fois sur la gâchette gauche.

2/ J'actionne une seconde fois la gâchette gauche et je la maintiens enfoncée pendant toute l'utilisation.

3/ Je sélectionne la direction et je déplace mon lit grâce au joystick situé sur la poignée droite.

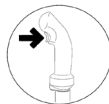


⚠ Toujours maintenir la gâchette de gauche enfoncée. Si elle est relâchée, le lit freine.

Vitesse de déplacement de la 5^{ème} roue motorisée

Marche avant normal (2,4 Km/h) :

1/ Je maintiens la gâchette gauche enfoncée.

2/ Je dirige mon lit avec le joystick de la poignée droite.

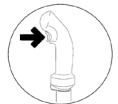

Marche avant rapide (5 Km/h) :


1/ Je maintiens la gâchette droite enfoncée.

2/ Je dirige mon lit avec le joystick de la poignée droite.

3/ Je maintiens la gâchette droite enfoncée.

Marche arrière : 1.2 Km/h


Les 2 pictogrammes précédents

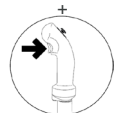

Comment arrêter la motorisation du lit ?


Freinage simple (doux) :

Je lâche uniquement le joystick et la gâchette de la poignée droite

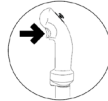

Freinage d'urgence :

Je lâche la gâchette de gauche et la gâchette de droite

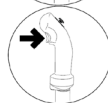

Voyants de la commande motorisée

Poignée de commande gauche du système motorisé et voyants

État de la batterie

- LED verte : la commande motorisée est prête à être utilisée
- LED jaune : la batterie est à moitié chargée
- LED jaune clignotante : batterie faible ; il faut la charger
- LED rouge : la batterie n'est pas chargée ; la commande motorisée ne peut pas être utilisée



État de la commande

- LED verte : le lit est débranché et les freins sont désactivés
- LED jaune : le lit est branché et/ou la pédale de la commande motorisée n'est pas engagée. Le système de déplacement motorisé est désactivé.

Pesée du CITADEL PLUS

Lit médicalisé pour patients obèses




Poids

Ce bouton sert à afficher le poids actuel du patient.

Auto-compensation

Ce bouton permet d'ajouter ou d'enlever des éléments du lit sans modifier la lecture du poids du patient.

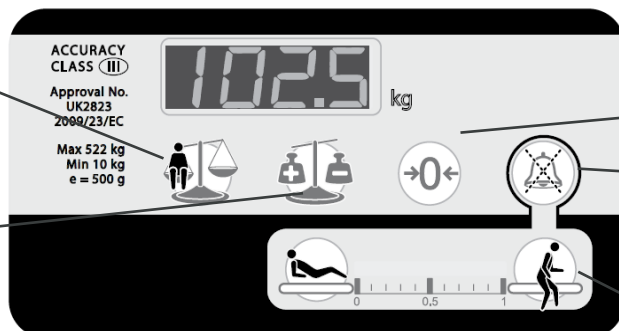

Remise à zéro du lit (Tare)

Bouton silence VariZone

Ce bouton permet de couper le son de l'alarme de sortie de lit pendant trois minutes.

Alarme sortie de lit

Comment tarer la pesée du lit Citadel Plus?

⚠ Je tare le lit avant l'installation de chaque nouveau patient

- 1/ Je débranche/rebranche le lit au secteur.
- 2/ Je prépare mon lit selon mon protocole d'admission du patient (matelas, draps, oreillers...)
- 3/ J'appuie sur le bouton
- 4/ J'installe mon patient

Comment lire le poids du patient

J'appuie sur le bouton de la pesée

Le poids s'affiche pendant 10 secondes puis s'efface. J'appuie à nouveau pour retrouver le poids.

Je peux peser mon patient quelle que soit la position du lit. Je n'ai pas besoin de le remettre à plat.

► **Si je débranche mon lit pour emmener mon patient en radiologie, par exemple, la tare reste en mémoire. Je n'ai plus besoin de retarer le lit.**

Comment utiliser la fonction Auto-compensation du lit Citadel Plus ?

La fonction Auto-compensation permet de venir ajouter ou supprimer des éléments sur le lit (ex : accessoires, arceau de drap, couverture, oreillers...) sans influencer le poids du patient.

⚠ Avant d'utiliser la fonction Auto-compensation, je dois attendre que l'affichage du poids du patient soit éteint.

- 1/ J'appuie sur le bouton
- 2/ L'écran affiche une animation en boucle
- 3/ L'écran affiche **AUTO** pour indiquer que le système est en mode Auto-compensation
- 4/ Je peux désormais ajouter ou retirer des éléments sur mon lit
- 5/ J'appuie une seconde fois sur le bouton
- 6/ L'écran affiche une animation en boucle pendant quelques secondes puis affiche le poids du patient.

⚠ Pour une bonne utilisation de cette fonction, je veille à utiliser un protocole identique pour l'ensemble du service. Sinon, il y a un risque d'écart important.

Zone d'influence de la pesée

Le panneau de tête (1), le support de la potence et des accessoires côté tête (2) et le cadre inférieur (3) n'ont aucune influence sur le système de pesée du patient.

Tout objet attaché ou placé sur une autre partie du lit a une influence sur le système de pesée du patient.

